

一种医用创新型加压冷热敷治疗仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 一种医用创新型加压冷热敷治疗仪 |
| 公司名称 | 河南希彤医疗器械有限公司 |
| 价格 | 299999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区优胜北路 |
| 联系电话 | 19937037270 19937037270 |

产品详情

加压冷热敷治疗仪

型号：LF-660

加压冷热敷机的热敷领域

热敷疗法是以各种热源为介质，将热直接传导给机体，从而达到治疗疾病目的的一种方法。应用热敷治疗疾病有着悠久的历史，热敷设备简单、操作方便、治疗效果良好，已在国内外医疗机构，甚至是患者家庭中广泛应用。热敷治疗技术传统热敷使用热敷理疗袋，时间一般在20-30分钟，温度一般情况40-45度，每日或隔日治疗一次，或每日两次（根据实际情况），15-20次为1个疗程。效果差，使用极其不便。

热敷

临床应用

1适应症软组织扭

挫伤恢复期、肌纤维组织炎、肩关节周围炎、慢性关节炎、关节挛缩僵硬、坐骨神等（急性期 24-48小时之后），根据患者的实际情况实施治疗。

加压冷热敷机的冷敷领域

加压冷热敷机冷敷是应用比人体温度低的物理因子（冷水，冰等）刺激皮肤或粘膜

以治疗疾病的一种物理治疗方法。冷疗温度通常为0摄氏度以上、低于体温，它作用于人体后，不引起组织损伤，通过寒冷刺激引起机体发生一系列功能改变，来达到治疗的目的，

临床应用

（一）适应症

1疼痛和性疾病

如落枕、急性腰扭伤、肩痛、颈椎病、癥痕痛、偏等偏瘫或截瘫后的肌肉。

2软组织损伤 用于运动损伤早期血肿、水肿的急救处理和恢复期的消肿止痛，如韧带、肌肉、关节的扭挫伤、撕裂伤，纤维组织炎、肌腱炎、滑囊炎等。

3内脏出血 肺出血，食管出血，胃十二指肠出血等

4烧伤的急救治疗 适用于面积在百分之二十以下、1-3度热烧伤，四肢部位的烧伤、应用冷疗治疗效果更好，可在损伤早期冰水浸泡损伤部位，直至疼痛消失。

5其他 如高需要对患者热、中暑的物理降温；寒性荨麻疹等用冷疗进行治疗。

（二）禁忌症

1.内科疾病 高血压病，心、肺、肾功能不全。

2.冷变态反应者，对冷反应者，致冷血红蛋白尿患者。

3.局部感觉及血液循环障碍，血栓闭塞性脉管炎等

加压冷热敷机冷敷方法

冷敷的方法有两种，一种是用冰袋冷敷。在冰敷袋里装入半袋或三分之一袋碎冰或冷水，把袋内的空气排出，放在病人额头、膝关节等处。没有冰袋时，用塑料袋也可，时间一般15-20分钟。

另一种冷敷法

是，把毛巾或敷布在冷水或冰水内浸湿，拧干敷在，用两块布交替使用。若降体温时，可用毛

巾或纱布包上冰块；冷

敷四肢、背部、腋窝、肘窝、国窝和腹股沟

等处，敷后用毛巾擦干，时间一般15-20分钟。

传统冷敷已无法满足临床需求，新一代加压冷热敷机治疗效果好，临床认可度高

加压冷热敷机注意事项

1时间不能持续过久，一般15-20分钟每次。

2经常观察皮肤变化，10分钟一次，如发现：皮肤苍白、青紫、麻木感应，表示静脉血淤积，应停止冷敷，否则会造成。

3在全身冷敷中，若病人有寒战，脉搏变快，呼吸困难，面色改变时，应停止冷敷。