

# 拔罐仪 美炫吉 北京

产品名称	拔罐仪 美炫吉 北京
公司名称	北京美炫吉商贸有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:美炫吉 型号:BSBY-6+2 产地:北京
公司地址	北京市丰台区方庄南路58号院9号楼商业单元107室
联系电话	53683798 13521502560

## 产品详情

品牌	美炫吉	型号	BSBY-6+2
产地	北京	箱装数量	1台
贸易属性	自主研发		

### -----产品描述-----

产品名称：

砭石能量拔罐仪-4型

产品简介：

bs-bair-4型由4个拔罐按摩头和一个理疗头组成。是一款便捷式的中型机；它比较适合中、小型美容院、社区诊所、小型按摩保健机构、运动队等对外盈利部门和非盈利团队使用；尤其对外经营的单位，它可以给你增加新的营业项目，并创造新的利润增长点，它可以在不增加人员的情况下，成为您的好帮手。

产品功效：

以砭石疗法为主导，以中医经络学为基础，运用现代化手段，将砭石疗法中的：“感、压、擦、刺、振、温”等适合现代人的疗法和传统的中医经络学中的“拔罐、按摩、针灸、热疗”等传统疗法有机地融为一体，以祛邪解表，疏通经络，调整气血，平衡阴阳，扶正固本，激活人体自身潜能，消除亚健康状态为目的。

### -----使用方法-----

- a、打开机箱，用酒精棉进行擦拭，接通电源，进行预热。
- b、待走罐杯温热后，即可进行操作。
- c、将定时器定到20分钟的位置，机器响后，将所有按钮关闭，只启动走罐杯所对应的按钮，进行开背痛经的操作，操作后要将按钮开关，以待进行下一步的操作。
- d、重新调整定时，检查其它按钮是否关闭，拿起第一组的两个拔罐头，同事压在所需治疗的穴位上，然后启动所对应的按钮，待两个罩杯吸牢后方可松手。如此反复，将6个罩杯和1个走罐杯都吸实在所要治疗的穴位上，即可启动振动按钮。
- e、定时铃响，机器停机后，轻轻逐个取下罐头，用理疗头进行修复调理，即完成了一次。

-----注意事项-----

- 、每个客人做完治疗后都要进行严格的消毒，以免造成相互的病变传染。
- 、使用仪器时要轻拿轻放，严禁叩碰。
- 、在给客人做穴位治疗前，一定要先检查按摩头的温度，以接近人体温度（36℃）最为适宜，过热时先要回调温控按钮，而后用酒精棉进行降温，待达到适宜温度后再进行操作。
- 、诊疗前要认真查看顾客的皮肤情况，询问客人的耐受力承度，根据情况及时调整走罐刮痧的力度和拔罐时间，以免给顾客带来疼痛。
- 、治疗完成后，要及时切断电源，以免减少仪器的使用寿命。