

脑循环功能治疗仪 经颅磁刺激仪 大鲸医疗

产品名称	脑循环功能治疗仪 经颅磁刺激仪 大鲸医疗
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百草岭 型号:ZL-N-800 产地:河南
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

一、经颅磁产品简介：经颅磁治疗采用国际上的“ 负极性变电场—经颅磁刺激 ”技术（rTMS-重复经颅磁刺激），是脑病物理治疗的一次革命性突破！

运用交变电磁场仿照人体大脑生物电磁场的设计原理，通过的治疗发生体输出特定规律的负极性的交变电场，直接透过颅骨作用于脑细胞和脑血管，可起到改善脑病灶区血液循环的作用，引导患者脑磁功能趋向正常化、秩序化。

二、主机优势：1、磁场（弱磁）控制更，而市面上的设备一般只能控制在30mt，我们可以控制在17mt以内。脑循环功能障碍治疗仪产品磁场分两档控制为：3-9mt、10-17mt，高效。（以往产品只能控制在3-15mt,15-30mt）

2、三种治疗模式输出，临床应用广阔。（缺血性脑血管病，神经衰弱，脑损伤性疾病的辅助治疗。）

3、多频震动功能，使物理治疗和电磁场治疗完美结合。多频震动功能，频率及幅度均3档可调节

4、智能彩屏、操作简便；双路输出，效率更高。

三、适用范围：1、缺血性脑血管病：脑供血不足、脑萎缩、脑椎底供血不足；2、脑脊髓损伤性疾病：脑损伤、脑炎后遗症、脊髓损伤、小儿脑瘫，癫痫；3、脑功能性疾病：神经衰弱、多动症、强迫症、孤独症。四：仪器使用:用生理盐水棉球清洁患者两耳侧乳突后，贴上一次性价体表粘貼电极。将输出主输出线的一对夹持器分别夹于两侧粘貼电极纽扣上，可用松紧绑带将两电极辅助固定。根据患者具体状况，设置各参数指标:模式、比率、强度、频率、时间。操作 按钮可得所设置的参数。按下准备/启动钮 使机器处于启动状态，输出的信号通过输出线传输到患者，开始进行仿生电刺激，计时器进行，随后按患者反馈调整合适强度。当设定输出时间完成，主机蜂器会发出呼叫声，主机自动回复到准备状态，此阶段仿生电刺激治疗结束，此时松下患者的绑带，取下主输出线的夹持器，取下粘貼电板，并在患者乳突处擦生理盐水作清洁处理输出线上除对主输出线(较短的一对，用于脑部仿生电刺激)外，另有一对辅助输出线(较长的一对，用于肢体或人体其它部位电刺激)，具体操作方法与上相同。

