

# 大鲸调制脉冲电中频治疗仪 物理康复设备 DJ-R9型

产品名称	大鲸调制脉冲电中频治疗仪 物理康复设备 DJ-R9型
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-R9 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

## 产品详情

大鲸调制脉冲电中频治疗仪 物理康复设备 DJ-R9型，可做家用，也可以医用，使用很方便。

### 性能结构

治疗仪由CPU电路板，功率放大器，输出保护电路，直流稳压电源及治疗电极组成。

该产品采用工作频率为2000 - 8000Hz,调制频率为0 - 200Hz,调幅度设有三种形式,波形选用正弦波、方波、三角波、指数波，由单片机编程，以等幅、调制、调幅、单波形和多波形组。

### 电脑中频治疗仪的注意事项

- 1、硅橡胶电极导电面应保持充分湿润，否则会有明显针刺感。在电极片黑色导电面上直接涂抹水，或是垫上完全浸湿水的棉布，注意棉布要平整，两片电极上各一块，禁止使用毛巾等粗糙的垫布。
- 2、请远离干扰环境，使用时请勿打手机、远离高频电、强磁场如微波，超短波等设备；请用独立的电源插座为理疗仪供电。
- 3、建议输出强度不要大于40mA,病人仍无感觉时，应停止操作，检查治疗仪是否故障。
- 4、电极固定到人体后，不要开关电源以免有电击感。应在开机后固定电极，在关机前取下电极。
- 5、定期检查电极板是否老化；电极线连接机身接口处是否有松动；电极线与电极板是否接触不良；电极线和电极板连接的金属头要经常清洁（长期使用后电极线金属头上会有黑色氧化物物体附在上面，请清除后再用）。

6、同一个病人在治疗1~2个疗程后（1疗程为7~10天），应间歇3~5天再使用，能达到更好的效果。

7、治疗中，严禁随意移动已固定好的电极板，以免电极板松动电击患者