

MUI-T8S多功能超声清创机功能简介

产品名称	MUI-T8S多功能超声清创机功能简介
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗 型号:MUI-T8 产地:重庆
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

多功能超声清创机

在临床的治疗过程中，对于深度烧伤主要是深2度或者3度烧伤创面，如果达到1%以上则自身难以愈合往往需要通过手术才能达到创面愈合的目的。

手术主要有烧伤创面清创其目的是通过清创将烧伤创面的坏死组织彻底清除干净，到创基鲜红出血、密集坏死组织清除干净之后才能进入下一步治疗。

选择使用生物敷料覆盖，还是自己皮肤移植，来达到创面的修复作用。

MUI-T8S多功能超声清创机具有三大功能：

1、超声波清创机是利用40khz的超声波震荡频率产生的空化效应去除创口上的糜烂组织和异物（该空化效应会在局部产生极高的气泡压力和微射流），该效应不会对健康组织造成损伤。

超声波清创（多功能清创机功能一）对感染伤口，慢性难愈合伤口处理效果非常明显。

超声波清创产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织、对正常组织无损害，不直接接触患处从而达到无痛清创目的。

清创过程中不会损伤伤口周围的神经和血管，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。

能激活成纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。

清创时根据伤口面的深浅，适当调整刀具与伤口清创面的距离，也可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创。同时可是药物能迅速进入深层组织，并能促进生长，加速愈合。

2、压力清创（多功能清创机功能二）选用56kpa安全水压，利用脉动水流的瞬间压力变化使得肌肉等组织中的异物更容易被冲掉。

压力清创适合各种大面积创伤。急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。

3、连续或间断地负压吸引（多功能清创机功能三）可减轻间质水肿，清除过多伤口渗液，减少感染，保持工作环境的清洁。

独有的负压回收、液位探测、液位报警，液位自锁功能，杜绝废液溢出。

适用范围：各类外伤、大面积创伤、烧伤、车祸伤、开放性骨折，长期难愈合伤口，感染伤口，例如足溃疡，褥疮，化脓性创伤，创面窦道等。 收费项目及代码：大清创：120500001 中清创：120500002 小清创：120500003

多功能超声清创机(清创仪)对于难愈性慢性损伤或溃疡多继发于老年病、糖尿病和放射治疗等，其实际发病率会更高，其中压迫性、糖尿病性、放射性等各类溃疡所占比例也会相应增加；中国工程院院士付小兵指出，虽然难愈性慢性溃疡不会立即威胁生命，但因长达数月甚至数年、十数年的经久不愈，严重影响患者原发病康复和生活质量，也给家庭带来沉重的护理与经济负担，少数可发生溃疡癌变。若发生感染扩散，可导致脓毒症等并发症，不但加重原发病而且将危及患者生命。多功能超声清创机作为一项创新技术，具有许多传统手动清创方式所不能比拟的特点和优势。大量的临床实验表明，多功能清创机操作安全性高，清理迅速，清除彻底，不会轻易损伤伤口创面周围好的组织，可让医者安全应用于一些骨科外科创面清创。 售后服务优势

多功能清创机是腾跃医疗科技有限公司联合第陆军医大学生物工程系、重庆大学电器工程系多位专家和技术团队联合研发的一款具有品质的清创设备。在全国多个中心城市都建立了服务中心，售后服务更加便利和快捷。