

爱谨 猪腺病毒抗原检测试纸卡 快速检测

产品名称	爱谨 猪腺病毒抗原检测试纸卡 快速检测
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	货号:AJP101 保质期:18个月 检测原理:免疫层析技术
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址)
联系电话	13588116846

产品详情

【产品名称】

通用名：猪腺病毒抗原检测试纸卡

商品名：无

英文名：Porcine Adeno Virus Antigen Rapid Test

汉语拼音：Zhu Xian Bing Du Kang Yuan Jian Ce Shi Zhi Ka

【主要成分与含量】

组分	数量	规格
猪腺病毒抗原检测试纸卡、 40 μL滴管、干燥剂	20袋	1份/袋
样品缓冲液	20管	1mL/管
样品采集棉签	1个/袋	
说明书	1份	/

【作用与用途】 用于检测猪眼睑及鼻咽等呼吸道分泌物样本中的猪腺病毒抗原。

【使用样本】猪眼睑及鼻咽等呼吸道分泌物。

【用法与判定】

1用法

1.1样本处理

1.1.1用样品采集棉签轻轻地从待检动物眼结膜处、鼻腔及口腔处采集分泌物样本（取样量见图1），将已采样的棉签插入样品缓冲液管中，搅拌10~15秒后取出，翻转8~10次后静置1分钟，使没溶解的样本沉淀，处理后的样本即为待检标本。

注意：收集后的样本应尽快进行检测，如若条件不允许，则应置于-20℃环境中并于一周内完成检测。

图1 加样示意图

1.2操作步骤

（1）从包装袋中取出试纸卡，使样品孔（S）和检测窗口朝上，放置于水平台面。

（2）用40 μL滴管吸取待检标本，使滴管竖直，在样品孔“S”中逐滴滴加3滴（约120 μL），并开始计时。

（3）静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

2判定

（1）在试纸卡检测窗口可观察到两条红色条带（T：检测线，C：质控线），无论线条深浅，皆判为阳性（见图2，A）。

（2）在试纸卡检测窗口仅观察到一条红色条带（C：质控线），则判为阴性（见图2，B）。

（3）在试纸卡检测窗口质控线（C）处不出现红色条带，无论是否有检测线（T）出现，皆判为无效结果（见图2，C）。对于无效结果，建议重复一次检测过程；若重复检测结果仍为无效，请联系当地经销商或我司及时反馈，以及时获取技术指导。

图2 猪腺病毒抗原检测试纸卡结果判定示意图

【注意事项】

（1）包装破损、过有效期的，请勿使用。

（2）试纸卡贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

（3）撕开铝箔袋取出检测试纸卡后应立即使用，防止试纸卡受潮。

(4) 请勿混用不同批次的样品缓冲液，且试纸卡为一次性消耗品，不可重复使用。

(5) 使用过的试纸卡及检测样品等应视同污染物，应根据相关法规要求妥善处理。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼

猪腺病毒属于腺病毒科哺乳动物腺病毒属，有4个血清型。病毒存在于下痢仔猪的粪便、有脑炎症状的脑组织和相关疾病的组织中，健康的猪的粪便中也可能有病毒。猪感染后病毒经粪便排出体外，污染饲料、饮水和环境，现经口传染给易感猪。吸入有病毒的气雾也可引起传播。

仅供兽医临床诊断使用