

爱谨生物 猪流行性腹泻病毒抗原检测试纸卡 AJP107 PEDV

产品名称	爱谨生物 猪流行性腹泻病毒抗原检测试纸卡 AJP107 PEDV
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱谨 保质期:18个月 存储条件:2-30摄氏度
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址)
联系电话	13588116846

产品详情

【产品名称】

通用名：猪流行性腹泻病毒抗原检测试纸卡

【使用样本】猪粪便。

【用法与判定】

1用法

1.1样本处理

1.1.1用样品采集棉签采集猪粪便（取样量见图1），将已采样的棉签插入样品缓冲液管中，搅拌10~15秒后取出，翻转8~10次后静置1分钟，使没溶解的样本沉淀，处理后的样本即为待检标本。

注意：收集后的样本应尽快进行检测，如若条件不允许，则应置于-20 环境中并于一周内完成检测。

1.2操作步骤

（1）从包装袋中取出试纸卡，使样品孔（S）和检测窗口朝上，放置于水平台面。

（2）用40 μL滴管吸取待检标本，使滴管竖直，在样品孔“S”中逐滴滴加3滴（约120 μL），并开始计时。

（3）静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

2 判定

【注意事项】

- (1) 包装破损、过有效期的，请勿使用。
- (2) 试纸卡贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。
- (3) 撕开铝箔袋取出检测试纸卡后应立即使用，防止试纸卡受潮。
- (4) 请勿混用不同批次的样品缓冲液，且试纸卡为一次性消耗品，不可重复使用。
- (5) 使用过的试纸卡及检测样品等应视同污染物，应根据相关法规要求妥善处理。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼

仅供兽医临床诊断使用