

# 医用恒温箱电加热FYL-YS-151L

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | 医用恒温箱电加热FYL-YS-151L                         |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                                  |
| 价格   | 68139.00/台                                  |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱<br>温度:0-100<br>容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号                         |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849                     |

## 产品详情

### 医用恒温箱电加热FYL-YS-151L公司说明-

北京福意电器集十几年的精湛及经验，以高起点和丰富的资源优势售后于用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就品牌”的经营理念，不断引进 优异的经营、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥优良大的组合效应。

医用恒温箱电加热FYL-YS-151L用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 医用恒温箱电加热FYL-YS-151L产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

### 医用恒温箱电加热FYL-YS-151L相关-

体温是维持人体生理功能的基本保证,人体温度设定在37℃,体温低于36℃称为体温过低.而在手术中,其发生率在50% -80%.术中后使体温调节功能抑制、体腔长时间开放暴露、静脉输入大量冷液体和库血、室温过低、体腔灌洗冷冲洗液等均能导致低体温的发生.对于一般体质的患者,在手术过程中体温降低1-2℃对机体不会造成太大的危害,而对于病情重、体质弱且年龄较大和偏小的患者,其体温的低下不仅会对机体造成损害,而且会危及生命.应引起重视.因此,术中应对体温进行监测,随时了解体温的变化,及时采取措施,减少并发症的发生.

医用恒温箱电加热FYL-YS-151L