

手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L（2-48）

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L（2-48） |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 71878.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱 温度:0-100 容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L（2-48）公司说明-

福意联利用科技创新，精益求精，满足，不断创造出更加符合客户需要的制冷产品，为保障人们的食品卫生和提升人们的生活而不懈努力！产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、生物制药、药房、制药厂、血站、站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L（2-48）用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L（2-48）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L（2-48）相关-

体温是维持人体生理功能的基本保证,人体温度设定在37℃,体温低于36℃称为体温过低.而在手术中,其发生率在50% -80%.术中后使体温调节功能抑制、体腔长时间开放暴露、静脉输入大量冷液体和库血、室温过低、体腔灌洗冷冲洗液等均能导致低体温的发生.对于一般体质的患者,在手术过程中体温降低1-2℃对机体不会造成太大的危害,而对于病情重、体质弱且年龄较大和偏小的患者,其体温的低下不仅会对机体造成损害,而且会危及生命.应引起重视.因此,术中应对体温进行监测,随时了解体温的变化,及时采取措施,减少并发症的发生.

手术室液体加热恒温箱FYL-YS-430L (2-48℃)