

# 理疗用体表电极 一类理疗电极片操作应用 中频治疗仪

产品名称	理疗用体表电极 一类理疗电极片操作应用中频治疗仪
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	35.00/袋
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-VII 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

## 产品详情

理疗用体表电极 一类理疗电极片介绍：

产品简介：理疗电极片，不可重复使用。发热均匀，可使人体更好的接受理疗，而且效果很好。

使用提示：将方形发热电极片与电极线相连接，一面贴于皮肤表面

治疗原理：双电极附于人体相应治疗部位，使仪器正负极连通，仪器产生的脉冲波通过电极片，像无数电针进行模拟针灸及按摩治疗。

配套产品：本产品可以配套发热电极线使用。

保质期：密封保存10° ----30° 情况下3年。

其他服务：我司可提供OEM服务，欢迎各位来电来函咨询订购。

各类规格无纺布电极片、硅凝胶理疗电极片、发热电极片

用途：配合中低频理疗仪器使用

禁忌/注意事项：孕妇、心脏安装起搏器者、皮肤破损处禁用；皮肤过敏禁用

理疗用体表电极的使用方法

1清洁粘贴部位。

2将导线(或纽扣)连接设备。

3去除隔离纸，将电极贴于使用部位、抚平背衬。

#### 注意事项

1使用时，应保持粘贴处皮肤干燥;电极片与皮肤紧密均匀接触。2勿将电极片粘贴于皮肤皱褶、骨头结节、伤疤组织、皮肤破损或发炎部位。

3过敏体质人群及老年人慎用，使用中若发现过敏应立即撕下，由医护人员处理后消除过敏。

4粘贴本产品不能接受磁共振图像检查。5治疗中，电极片不可置于心脏前后。

6使用前或使用中如有问题，建议向医生咨询。

7本产品应贮存于相对湿度不大于80%通风良好的室内。8除非立即使用，否则请勿拆开包装。

理疗用体表电极应用广泛 可以搭配各类中频治疗仪 低频治疗仪 生物反馈刺激仪等等

品种齐全 规格多样 用途广泛 医院常见科室都可自由使用