

## 3M压力蒸汽灭菌指示胶带 南京便诊生物

产品名称	3M压力蒸汽灭菌指示胶带 南京便诊生物
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

## 产品详情

### 【商品名称】

3M压力蒸汽灭菌指示胶带南京便诊生物

### 【规格编号】

产品编码	产品名称	产品规格	供应商
BQHS50311	3M压力蒸汽灭菌指示胶带	19mm*55m/卷	南京便诊
BSHS50313	压力蒸汽灭菌指示胶带	25m/卷	南京便诊
BZS50309	压力蒸汽灭菌指示胶带	55m/卷	南京便诊
BZS5030X	3M标签型指示胶带(高温)	30片/张 50张/盒	南京便诊
BZS50311	3M高压蒸汽灭菌指示胶带	1.9cm*55m/卷	南京便诊
BZS50368	3M环氧乙烷灭菌指示胶带	1.9cm*55m/卷	南京便诊

### 【产品说明】

本品是一种化学指示胶带。可用于压力蒸汽灭菌的包外化学检测；用于考核灭菌包裹是否已灭菌过，进而考核灭菌是否达到灭菌条件；压力蒸汽灭菌指示胶带直接粘贴于包外，操作者和使用者可直接观察变色情况，可及时发现灭菌不合格包裹。可用于下排式和预真空压力蒸汽锅。取一定长度的压力蒸汽灭菌指示胶带，直接粘贴于包裹外，建议不低于5cm，并轻压胶带以增加粘性和封包效果；可直接用圆珠笔在胶带上记录。

变色机理：本产品是专用于压力蒸汽灭菌的化学指示拉带，斜形条纹内含特殊染料，当达到一定的灭菌条件121、15分钟；132、4分钟，卡上的指示剂由米白色变为深褐色，如变色不均匀或不彻底，可提示该包裹“不符合灭菌条件”，同时结合压力蒸汽灭菌包内化学指示卡和生物指示剂来全面衡量灭菌效果。压敏性粘合剂，粘合佳，但易揭除；能粘于各种包裹材料，可起到很好固定包作用。皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在加热时，不易松解断裂；背衬上涂有防水层，遇水时，染料不易受损；并可书写记录，灭菌后颜色不易褪色。

### 【技术标准】

1. 本品性质：
2. 本品参照最新的国家标准，完全符合国家要求；
3. 提供多种规格、不同级别要求的产品，方便您的需要；
4. 快递传递产品，让你收货无忧！！

### 【用途】

适用于121 下排气式压力蒸汽灭菌器、适用于132 ~ 134 预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌器、134 ~ 136 台式或卡式压力蒸汽灭菌器等各种型号的压力蒸汽灭菌器，指示灭菌处理过程。

### 【贮藏条件】

贮存于室温（15 -30 ）、50%相对湿度，避光（包括太阳光、荧光灯以及紫外线消毒灯光）、避湿；不得与有污染或有毒化学品共处。

### 【保质期】

18个月。

### 【注意事项】

仅可用于压力蒸汽灭菌的化学监测，不能用于干热，化学气体灭菌的监测。

### 【公司】

公司名称：[南京便诊生物科技有限公司](#)

地 址：南京市江宁区东山天印大道880号

联系电话：025-52838289, 85099525,13951923346

传 真：025-52838289

信 箱：njbianzhen@163.com

网 址：[www.njbianzhen.com](http://www.njbianzhen.com)

QQ: 85026057 2232629373 945313800 QQ群：71118106

### 【公司简介】

南京便诊生物科技有限公司是专业生产一次性成品培养基等微生物产品的专业性公司，质量参照最新《中华人民共和国药典》2010年版、《国家食品药品检验标准》和《临床医学检验手册》的产品质量标准及检验方法执行，达到临床试剂要求。公司技术团队通过不断的改进生产工艺及生产设备，使其产品质量不断提高，得到很多新老客户的大力认可，并有很多老客户自发的帮我们介绍客户，在此，我代表我们公司全体人员向你们表示最真诚的感谢，同时我们会更加努力，进一步提高，推动微生物行业的发展，为我们各位检验人员提供方便、快捷、准确的产品！

具体的产品说明和更多的产品介绍您可直接登陆南京便诊公司网站([www.njbianzhen.com](http://www.njbianzhen.com))；

联系电话：025-52838289, 85099525, 13951923346

我们将为您提供优质产品、贴心服务！

### 【相关产品】

商品编码	商品名称	规格
BZS5030P	3M高压蒸汽灭菌用生物指示剂	100支/盒 4盒/箱
BZS5030O	3M高压蒸汽灭菌用生物测试包1276	25包/箱 25支对照支
BZS5030Q	3M高压蒸汽灭菌用标准测试包1276F	25包/箱 5支对照支
BZS5030R	3M快速阅读生物指示剂	50支/盒 4盒/箱
BZS5030N	3M高压蒸汽灭菌用快速生物测试包1296	25包/箱 25支对照支
BZS5030S	3M高压蒸汽灭菌用快速生物测试包1296F	25包/箱5支对照支
BZY10062	500g酵母浸粉[酵母浸出粉][酵母粉]	500g/瓶
BZY10063	250g酵母浸粉[酵母浸出粉][酵母粉]	250g/瓶
BYPY10095	15kg酵母浸粉[酵母浸出粉][酵母粉]	15kg/包
BXRY10015	50ml无菌脱纤维绵羊血（全血）	50ml/瓶
BXRY10016	100ml无菌脱纤维绵羊血（全血）	100ml/瓶

BXRY10017	250ml无菌脱纤维绵羊血（全血）	250ml/瓶
BXRY10018	500ml无菌脱纤维绵羊血（全血）	500ml/瓶
BZS5030T	3M环氧乙烷用生物指示剂1264	100支/盒 4盒/箱
BZS5030U	3M环氧乙烷用快速阅读生物指示剂1294	50支/盒 4盒/箱
BZS5030V	3M环氧乙烷用快速生物测试包1298	25包/盒 2盒/箱
BZS30803	3M快速阅读器（环氧乙烷用）290G	1台/箱
BZW12026	表面培养基[多种规格、充填物的接触碟]	60mm
BZW12031	改良马丁琼脂培养基	70mm/90mm
BZW12092	硫乙醇酸盐平板培养基	70mm/90mm
BZW12097	硫乙醇酸盐流体培养基	10mm/40mm
BZW12004	血琼脂平板	70mm/90mm