

豪华款超声清创机-慢创清创修复治疗仪

产品名称	豪华款超声清创机-慢创清创修复治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗类 型号:MUI-T8 产地:重庆
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

外科多功能超声清创仪

清创术是将伤口以及皮肤表面污物完全的清理干净，一般用生理盐水进行冲洗，冲洗干净以后再用双氧水将伤口内部进行冲洗，目的是杀灭伤口内部的细菌、真菌以及芽孢等一切微生物。冲洗过程中，伤口内部会起很多的泡沫，然后再用生理盐水将伤口内部的双氧水冲洗干净，再用碘伏将伤口内部以及伤口周围消毒，消毒的范围在距切口大约15公分左右。消毒完了以后，再将伤口进行分层缝合，如果伤口内部有肌腱损伤也需要进行缝合，后将皮肤缝合就可以。

适用范围：

- 1、各类外伤、手术切口、污染或者感染伤口/创面，如烧伤创面、化脓性伤口/创面、窦道、瘘道等；
- 2、难愈伤口，如糖尿病伤口、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡等；
- 3、软组织创伤、开放性骨折清创冲洗等。

优势

- 1、超声清创是一种选择性清创，在清除坏死组织的同时可保护新生肉芽组织，缩短愈合时间。

2、超声清创用液量少，水流为雾化状无压力，只有在刀头接触创面时才会有轻微触感故不会造成疼痛。

3、具有数字控温功能的超声清创产品。可将清创液的温度自动恒定在25-35度范围内，降低冬季低温液体对创面的刺激。在提升舒适度和降低疼痛的同时亦可避免因温度剧变引起的血管收缩、痉挛而导致凝血机制障碍等不利于伤口愈合情况的发生。

4、水电分离式可拆卸手柄，解决了管路和刀头的消毒问题，提高手柄的使用效率与寿命。刀头采用TC4钛合金，并通过了生物相容性试验（有检验报告），可直接接触创面。

适用科室：急诊科、内分泌科、烧伤科、换药室、手足外科、创伤科、创面修复科、骨科等。（只要有伤口/创面的科室均可适用）

禁忌：眼部冲洗，头部伤口，孕妇腹部伤口；安有电力驱动装置(如心脏起搏器)的病人伤口/创面。

治疗次数间隔：每日一次或隔日一次冲洗。

临床效果总结：外科多功能清创仪适合于人体部分可直接接触的污染与感染部位的冲洗治疗与负压引流，总体有效率（显效率加有效率）为95%以上，细菌清除率达93%，是常规清创的3-4倍，减轻病人的炎症反应和疼痛，减少渗液且无任何副作用。