

犬咬伤清创机-动物抓咬伤创面冲洗治疗设备

产品名称	犬咬伤清创机-动物抓咬伤创面冲洗治疗设备
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗类 功能:自带液体加温 流量:连续可调
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬伤清创机 设备特点：1、脉动压力清创56kpa/900-1800次/分的脉动水柱创面冲洗，适用于大面积快速清创，如急诊科犬咬伤患者，被咬伤后正确及时的处理伤口，是防治狂犬病的道防线，如果及时对伤口进行了正确处理，和抗狂犬病暴露后治疗，则可大大减少发病的危险。多功能清创机可使创面及裂缝中的异物细菌在人体可承受的安全值压力范围内被翻动和冲掉，实现多方位，大水流适度压力的清创。2、40KHz频率的超声波频率，利用超声波换能器的空化效应产生的塌陷、爆破的微射流能量，使得伤口腐烂组织、积液或深度创面被彻底冲洗干净，又称无痛清创。3、负压吸引功能，配备有两个2000ml的负压瓶，每分钟6000ml的引流量，保证在创面清洗过程中保持创面环境的干净整洁。用途：广泛适用于各种急、慢性、难愈性创面，污染性、感染性创面，如外伤、手术伤、犬咬伤（注册证独有）、感染伤口/创面、创面、化脓性伤口、创面、窦道、瘘道等，清创率可达98%。1、医疗：采用多功能清创机能够有效地解决目前科室在清创上的痛点问题，提高清创的质量和速度，减轻医护人员的工作强度，并且对于患者可以实现无痛清创，治疗效果好，伤口恢复快。清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创

2、教学：便于科室开展创面修复教学，学习先进的清创手段，提高科室教学能力。3、科研：好的清创设备有利于开展临床的学术研究，探究先进清创方法与传统清创的区别，为科室科研工作提供好的工具。4、预防：清创设备可以实现彻底清创，有效去除细菌、真菌、坏死组织，不会损伤伤口周围的神

经和血管，抑制了伤口感染的发生。5、其他：弥补科室先进清创设备的空白，不但在临床上有很大价值，而且对医院和科室有很大的社会价值。

1.该设备临床使用疗效好，得到患者的认可及广西临床的推崇。2.国内已具备生产本设备的技术的条件，可以达到临床需求，该设备采用40KHz的超声波频率，56Kpa的安全水压可以彻底有效的清楚伤口中的异物、细菌。3.在不增加人员和特殊诊疗场地和设备的情况下，可以使一部分病人不再流失（转院），为本院带来更多的直接经济效益。4、该设备在广西河池市人民医院，四川省人民医院、郑州大学附属医院、第四军医大学附属西京医院等国内多家知名单位在临床使用，并得到一致好评。伤口冲洗和清洗用弱碱性清洗剂和一定压力的流动清水交替清洗所有咬伤处约15分钟，然后用无菌纱布或脱脂棉将伤口处残留液吸尽，若清洗时疼痛剧烈，可给予局部麻醉，如条件允许，可以使用的清洗设备对伤口内部进行冲洗，以确保达到有效冲洗，最后用生理盐水冲洗伤口，避免在伤口处残留肥皂水或其他清洗剂。有证据表明，即使在没有使用狂犬病被动免疫制剂的情况下，通过有效的伤口清洗后立即接种狂犬病疫苗并完成暴露后预防程序，99%以上的患者可以存活。消毒处理彻底冲洗后用稀碘伏

或

其他具有灭活病毒能力的医用制剂涂擦或清洗伤口内部，可以灭活伤口局部残存的狂犬病病毒。清创及扩创犬咬伤伤口尤其撕裂伤清创去除坏死组织，必要时行扩创术，穿刺伤伤口可以进行必要扩创确保清创效果。伤口闭合的方法因咬伤类型不同而在一定程度上有差异，划伤及简单穿刺伤不需要Ⅰ期闭合。单纯撕裂伤伤口，临床医生可采取Ⅰ期伤口闭合。如果美观需要时，如面部撕裂伤，临床医生也可以对这类伤口选择Ⅰ期修复。给予恰当的伤口处理对于接受Ⅰ期伤口闭合患者的预后和降低感染风险极为重。缝合咬伤伤口时，需要进行充分的冲洗、清创，避免深部缝合（如果可能），预防性抗生素治疗以及密切随。延迟闭合6小时以上的伤口、易感染患者（如免疫受损、无脾或脾功能障碍、静脉淤滞、成人糖尿病）的伤口不建议进行Ⅰ期伤口闭合。早期治疗中进行伤口清洁和失活组织清创，将咬伤伤口开放引流，定时更换敷料，至受伤72小时以后可视伤口情况行延迟闭合。预防破伤风犬咬伤伤口属污染伤口，感染破伤风几率较高，应根据《非新生儿破伤风诊疗规范（2019年版）》中附件1《外伤后破伤风疫苗和被动免疫制剂使用指南》进行破伤风预防。预防狂犬病犬咬伤是狂犬病发生的主要途径，可能感染发病，应根据现行的狂犬病暴露预防处置的规范、指南进行狂犬病预防。