

鲁尔滑索接头玻璃注射器 鸽牌 20ml

产品名称	鲁尔滑索接头玻璃注射器 鸽牌 20ml
公司名称	金坛市五星医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州金坛市后阳集镇沿河西路16号
联系电话	86-51982883433 18961261955

产品详情

厂家直销 鲁尔滑索接头玻璃注射器 鸽牌 20ml

苏食药监械（准）字2009第2150455号

原产地：江苏省金坛市

数量：100,000 pcs

海关HS编码：90183100

金坛市五星医疗器械有限公司始建于1965年，为玻璃注射器生产的专业厂家，品种规格从蓝芯1ml全玻璃注射器到2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、100ml八个系列品种。经过三十几年的努力奋斗，企业现在发展为全国最大、知名度最高的全玻璃注射器专业生产厂家，现工厂占地面积15000平方米，干部职工总人数1500人。其中中级技术职称的5人，初级技术职称10人，技术人员20人，专职质量管理工人工序、专业检验人员9人。现年生产能力1200万具。主要生产设备90台，拥有固定资产1000余万元。产品畅销全国30多个省市自治区，出口东南亚10余个国家。特别是2ml、5ml、10ml注射器占全国麻醉包市场80%-90%，并深受广大客户的好评。欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈。

全玻璃注射器使用说明书

一．产品的材料结构、规格：

用硬质玻璃制造；由外套和芯子组成。规格：1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、100ml

二．产品用途

该产品装上注射针后，作为人体进行皮下、肌肉、静脉注射或溶药等。

三．使用方法：

1. 在使用前必须先将芯套拔出去，进行常规清洗消毒。
2. 经清洗、消毒，装上注射针后，抽取药液，在注射前应将针头朝上，轻推芯子，将注射器内空气赶尽方可使用，以免空气进入人体。
3. 注射粉剂、油剂或血浆等，用后应立即将芯套拨开。及时清洗，以免粘牢。

四．注意事项：

1. 消毒前不宜用重碱性溶液洗涤，以免玻璃重而引起漏水。
2. 用纱布包扎，可延长使用寿命。
3. 消毒方法应采用高压消毒，也可用煮沸消毒，但不能用火直接烧灼。
4. 洗涤时，芯子与外套相配不宜操之过急，以免产生卡住，导致外套口破裂。如碰到这种情况，可将注射器在桌上轻微震动，即可取出。
5. 洗涤消毒时，要注意轻拿轻放，避免碰撞而发生损坏