

电子健康人体秤 体重秤 辉达电子

产品名称	电子健康人体秤 体重秤 辉达电子
公司名称	应美君（个人）
价格	29.00/个
规格参数	产品类别:体重秤 品牌:辉达电子 货号:HD-660
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市芝英镇格塘村54号
联系电话	86 0579 7443668 15068095516

产品详情

产品类别	体重秤	品牌	辉达电子
货号	HD-660	产品类型	电子
适用人群	成人	功能	测体重
最大秤量	180KG	产地	浙江武义
箱装数量	10PCS		

武义辉达电子衡器有限公司座落于风景秀丽的浙江武义,临近有宁波,上海等港口城市,为出口贸易提供便利的交通环境.公司集自主研发,生产,销售为一体,有自己的一整套的生产经营模式.具有强大开发能力的科技型企业,专业生产各种现代化衡器,产品性能卓越、美观、实用。完善的生产管理及优异的市场信誉,使产品赢得了广大客户的青睐。注:款式较多,请注明

采用最新的程序,重量开机、自动上秤功能,设计更为人性化。精选6毫米精磨边钢化玻璃,0.8寸液晶显示屏显示

基本规格

- 1: 高强度钢化玻璃: 280*280毫米
- 2: 关机方式:自动关机 3: 称重范围: 5-180kg
- 4: 分度值: 0.1kg
- 5: 显示方式: 4位液晶显示
- 6: 电源: 3v cr2032锂电池

7：工作温度：10-35摄氏度

8：称重单位：kg/lb

9：自动关机：15秒

10：低电压显示：“lo”

11：出错显示：“---”

12：超重显示：“o-ld”

操作说明：

1：打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“kg”，中间为切断电源，右端为“lb”

2：开机后把秤置于水平地面，液晶显示“0.0kg”，等待三秒即可上秤称重

3：人稳定站在秤面中间，开始称重，称量值稳定后，锁定称量值

4：人体称量值显示，保持15秒后关机

5：若开机显示“lo”，表示电池已低效，应更换电池

6：称量显示“---”，表示称量出错，应重新开始

7：保持干燥，勿碰水

注意事项

1：不使用时不要在秤面上堆压物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

2：称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

3：人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

4：不能用力重击秤体。

5：不要放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗

6：出厂时已装配锂电池