

GL 美国格朗 硬头电子体温计GLW-1

产品名称	GL 美国格朗 硬头电子体温计GLW-1
公司名称	汕头市格朗电子有限公司
价格	24.00/个
规格参数	产品类别:电子体温计 品牌:格朗 规格:68*18*175
公司地址	汕头市成德工业村E座408号房
联系电话	86-0754-8866627

产品详情

产品类别	电子体温计	品牌	格朗
规格	68*18*175	型号	GLW-1

使用说明：1、按下开关按钮，当显示屏显示I 或室温或记忆显示最后一次温度时，即可开始测量。2、将体温计夹于腋下或放入口腔中，待蜂鸣器发出提示音并且 符号停止闪动时即可取出读数（产品具有记忆功能，提示音过后将保持原有读数）。3、使用后请按下按钮关闭电源；如果没有关闭，10分钟后系统会自动切断电源。4、测量范围：32 ~42 ；测量时间：1分钟左右；精确度：±0.1 5、需要连续测量时，为使测量结果更准确和更方便对比，请在每天同一时间和身体同一部位测量6、人体不同器官因受外界影响等原因，对体温转变的反应不同，因此同一情况下测量结果亦会不同，各部位正常体温范围如下：口腔35.5-37.5 耳道35.8-38.0 肛门36.6-38.0 腋下34.7-37.3

注意事项：1、测量前后最好清洗消毒（可用棉花沾少许酒精擦试，不可用热水煮沸消毒）。2、采用腋下测量方式时，要放在腋窝中间，一定要用力夹紧，保证体温计与人体充分接触。3、采用口腔测量方式时，一定要将体温计放在舌下，稍用力压住；因为测量的时间只有一分钟，如果前面的探头没有与人体充分接触，会产生误差。