

中医针灸康复冷热敷机-新品加压冷热敷治疗仪

产品名称	中医针灸康复冷热敷机-新品加压冷热敷治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:二类治疗类 功能:冷敷、音乐治疗、体温监测 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

脉动加压冷热敷机治疗系统

型号：LF-660

清领全自动加压冷敷治疗系统采用航天级半导体温控技术，结合全自动加压循环冷敷治疗原理，可满足临床病患围手术期的镇痛、消肿、减渗等整体治疗方案需求。全新一代全自动加压冷敷治疗系统，以其多功能多样化治疗方案、先进半导体制冷温控技术，临床专家指导升级建议和临床经验积累等优势,成为全球同类产品的新代表。

传统冷敷：

1、冰块冰敷温度不可控，与不贴合，冰敷效果不佳。皮肤温度至少降至20 以下，关节腔内温度才会下降。国外Schroder等认为只要皮肤及皮下组织温度降到10-15 ，关节腔内温度就可达到要求。而冰块冰敷时，温度会由低变高，冰敷温度无法维持恒定冷敷效果不佳。

2、错误冷敷方式可能引发“继发效应”继发效应是指用热或用冷超过一定的时间，产生与生理效应相反的作用。继发效应是身体的一种防御反应，可保护机体免受损伤。当使用过冷的温度长时间冰敷时，组织下血管收缩，可能会导致局部缺血。机体会调节，强制血管扩张，进一步造成二次出血。为保护患者，必须合理控制冷敷温度和时间！

产品特点

1.技术：航天级半导体制冷技术，清洁能源，可靠免维护

2.准精：温控技术，温度误差 ± 0.5

3.高效：液体可循环，冷量交换效率高

4.体验：人体解剖学设计冰囊，与关节贴合性强，冷效果更优，冰囊采用医用高分子材质，可消毒重复使用，冰囊可透视X光线，材质柔软，舒适度更好

5.支持：多治疗方案可选，根据病患制定针对性治疗措施

6.安全：缺水、堵塞、水温异常等报警，多重安全防护

7.简易：触屏设计，界面简单清晰，极易操作

8.操作：普通人员装机培训即可操作，无需证书

新一代加压冷敷治疗机产品卖点：国产产品

临床使用方法：

间隔性冷敷方法：

每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗舒适度，一般在18左右）

持续性冷敷：

24小时持续冷敷（冷敷温度15-18）；也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18）
关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15）

禁忌症：

1、雷诺病，对冷过敏者、冷变态反应等患者，血管痉挛及有局部血液循环障碍者必须禁用冷疗法，雷诺综合征患者受到寒冷刺激时会发生动脉痉挛，从而可能导致组织缺血性坏死；

2、开放伤口或皮肤感染者、断肢再植及再生的周围神经等患者。

3、认知障碍、言语障碍患者；温度调节功能较差患者；此外冷疗会降低肌肉灵活性，使运动成绩下降，因此，在比赛前不宜使用。

适应范围

1.各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

2.各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

3.各类急性软组织疼痛的康复治疗。

4.人工膝关节、髌关节等假体置换术后治疗。

5.急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。

6.各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗。