

# 江西蛇牌GD685颅脑钻马达维修故障 广州汇益

产品名称	江西蛇牌GD685颅脑钻马达维修故障 广州汇益
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

## 产品详情

### 蛇牌GB740R铣刀直接头维修【广州汇益】

蛇牌铣刀手柄GB740R的保养及磨钻手柄GB757R等 - - 尾部加油

用蛇牌保养喷油GB600喷嘴完全插入手柄尾部并喷注2-3秒左右，将手柄内的污垢冲出擦净多余的油。必须将手柄头端向下倾斜，蛇牌GD685颅脑钻马达维修建议，使污物从手柄头端顺势流出。如有污迹流出重复喷注步骤直至头端清澈的油流出，其它磨钻手柄喷油方式一样。

### microspeeduni刨削马达

紧凑的轻型结构(275克)、采用材料以及符合人体工程学的设计理念推出了一种全新的标准。

自动端头识别系统可以自动调整刨削头(200—5,000rpm 或扩孔头(1,000—8,000rpm)的速度范围。两种端头的摆动频率以及加速和制动特性可以根据的手术要求进行调节。

在手柄上可以轻松方便地对吸引速度进行调节。

GD682可以在广泛规格的一次性和可重复使用的刨削头中选择。

蛇牌刨削系统和其刨刀拥有更好的安全性，避免切割压力过大而造成的刀片断裂，确保使用安全。

直径3.0mm;型号GB955SU

直径3.7mm;型号GB965SU GB965R

直径4.5mm;型号GB975SU GB975R

直径5.5mm;型号GB985SU GB985R

高速动力的清洗:为避免杂质粘结和结垢,用后闲置时立即用不起毛的湿布擦拭手柄和硬脑膜保护鞘及附件的外表面便于术后的清洗,术后气动动力系统的马达和手柄可用纱布在流水下进行清洗,但应注意不能让水流进手柄内部。清洗完后用高压气体,热风机等做干燥处理.

重要:马达和手柄千万不能直接冲洗及放进水里或消毒液中浸泡,不能用超声设备清洗。(铣刀,磨头等附件可冲洗清洗,须保证清洗后做干燥处理)

清洗、干燥后,需用蛇牌油对马达、手柄和附件进行加油、保养(HILANXS喷油GB600,滴油GA059)。

#### GA740R高速马达的保养

高速马达GA740R由于转速高,其中的驱动装置容易磨损,须通过蛇牌油润滑。

用蛇牌保养喷油GB600喷注马达的尾部2-3秒左右,将马达内的污垢冲出,更后擦净多余的油(马达尾部稍向下倾斜便于污垢流出)。重要:必须将马达开关置于“1”的位置,否则油无法渗透马达内部。更后擦净多余的油.

江西蛇牌GD685颅脑钻马达维修故障-广州汇益由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司是一家从事“动力系统,摄像系统,超声乳化仪,超声换能器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“美敦力,史赛克,施乐辉,林弗泰克,史托斯,蛇牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使广州汇益在医疗设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!