

千里之行，始于足下|借助科技保护双足，杰斯特足疗机

产品名称	千里之行，始于足下 借助科技保护双足，杰斯特足疗机
公司名称	永康市奇利刀具厂
价格	780.00/台
规格参数	产品类别:按摩仪/按摩器 品牌:杰斯特 材质:ABS
公司地址	中国 浙江 永康市 东城街道河南二村
联系电话	86 0579 87220890 13858922252

产品详情

产品类别	按摩仪/按摩器	品牌	杰斯特
材质	ABS	货号	JST—108
规格	足疗机	按摩部位	足部
按摩原理	振动	动力模式	电动
适用场合	家庭、酒店	是否带USB	否
颜色	红色	重量	9.5kg
箱装数量	2台	产地	浙江
适用送礼场合	商务馈赠、生日、员工福利、节日、颁奖纪念	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

行走江湖，千里之行，始于足下；

借助科技保护双脚，虽千里，能奈我何。

——杰斯特足疗机

杰斯特足疗机详细参数

产品名称	杰斯特第二代足疗机	产品型号	jst—108
额定电压	220v	消耗功率	40w
产品尺寸	620mmx420mmx295mm	产品重量	9.5kg
储存温度	-15 ~+85	工作温度	+10 ~+40
按摩速度	高、中、低三档调节	产地	中国浙江

足疗机，是集按摩学、经络学、全息学、反射学为一体的高科技保健器件。它操作简便、效果显著、无副作用，还能健身养生，中医学认为：人体五脏六腑和脚都有相应的关系，人体踝部以下有60余个穴位，用足疗机按摩这些穴位，可起到促进气血的运行，和煦脏腑的作用，坚持做睡前足疗，有助于安神祛烦，催促入睡，使睡梦更加香甜。足疗机正是调整身体状况、缓解生活压力的一种较为理想的方式。

杰斯特足疗机产品特点

- 1、全面按摩、突出重点：对整个足部进行按摩，在按摩中间对有病的部位进行重点按摩。
- 2、双足双穴同步：经科研人员研制和试验得出的结论表明，双足双穴足疗方法比单足单穴的足疗效果要高出3到5倍。
- 3、对症取穴：陶然足疗机可根据个人不同身体健康状况自主针对病理区域去选择不同的穴位进行。
- 4、不受任何时间、空间的限制：陶然足疗机就像把专业足疗师请到家一样，可以每天在沐浴后、临睡前、观看电视节目时休闲地“自主足疗”了，是方便、简易、速效的方法。
- 5、独特的造型设计和穴位分布完全吻合人体足部结构，根据人体脚部穴位的分布，采用凹凸设计以起到最大限度的按摩足部的功能；
- 6、可根据个人喜欢随时随地调节转速和转向，使用简单方便。

杰斯特足疗机适用范围

- 1、家庭、办公、休闲等保健按摩使用，解除疲劳；
- 2、风湿病、脾胃病、失眠、头痛、感冒、慢性前列腺炎及妇科盆腔炎等疾病的康复治疗，下肢静脉曲张、腰腿痛、足跟痛、足癣、鸡眼等下肢疾病的康复治疗；脑外伤、中风、腰椎间盘突出症、肾病、糖尿病等大病、重病后的康复治疗；
- 3、亚健康状态的康复与保健。

足疗主要有以下几方面好处：

首先，足疗可以促进血液循环和新陈代谢。冬季人的体温较低，足疗可以改善足部血液循环，促进足部和全身血液流通；同时血液增加的同时还能改善心脏功能，降低心脏负荷

，调节各内分泌腺体分泌各种激素，促进新陈代谢。

其次，足疗可以提高人体抵抗力和免疫力。冬季足疗增强人体新陈代谢，提高对外来病原微生物的抵抗力。

第三，足疗可以美容护脑，改善睡眠。经常足疗可以调节经络和气血，使头部血流加快，及时足量补充大脑所需氧气和营养物质。常按脚上的睡眠反射区，还可对大脑皮层产生抑制，使人感到脑部舒适轻松，不仅能加快入睡，还能使睡眠加深。

第四，足疗能消除疲劳缓解压力。冬季很容易使人感觉困顿疲劳，尤其是上班族，工作压力很大，适当足疗，可以在放松身体的同时缓解精神压力。

杰斯特足疗机主要功能

- 1、体验家庭足疗大师：人性化的足疗大师，三维立体仿生按摩法；
- 2、经济实惠：5分钱做足疗（200瓦，每天半小时，只用5分钱电费）；
- 3、品味生活、自主足疗：提高生命质量，加强自我防治疾病能力。
- 4、低投入、高回报：双足双穴同步按摩，双通道双力度，足疗效果比人工足疗高出4倍！
- 5、美容瘦身：减肥、美肤。
- 6、改善睡眠。
- 7、改善胃肠道：便秘。
- 8、提高免疫力：足部按摩刺激各腺体反射区可调节其分泌功能，增强机体抗御疾病的能力，对各种过敏性病变、支气管哮喘、风湿病、皮肤病均有显著疗效。

杰斯特足疗机使用说明：

步骤一：插上电源

电源插头插入符合规格（220v/50hz）的电源插座上，按摩器的按摩揉捏片将会自动张开到最大位置，坐好将双脚放在足部按摩器的对应位置上，切忌双脚站立在足疗机上。

步骤二：开始按摩

按下“电源开关”键，“电源led指示灯”点亮，并听到蜂鸣器短响，产品开始工作，自动进入到程序。

步骤三：改变按摩方式

若要改变按摩程序，按下“程序选择键”程序可在程序i、程序ii、程序iii中切换

若要改变按摩速度，按下“速度选择键”速度可在速度i、速度ii、速度三中切换

若要进行理疗，按下“理疗开关”，理疗led指示灯点亮表示正在进行理疗

理疗过程中按摩器会对脚步加热

步骤四：结束按摩

本产品按摩时间为15分钟，按摩结束后将自动关机，若要提前结束按摩，直接按下“电源开关”键。

其他按摩功能：

程序一：保健按摩，提供磁疗功能

程序二：侧重脚尖、前脚掌部位按摩，刺激头部、五官、脑部、颈肩等反射区

程序三：侧重脚跟部位按摩，刺激腿、生殖、泌尿系统等反射区。售后服务：1、一年之内非人为损坏，免费保修。

2、产品本身质量问题退换货的由公司承担

3、人为损坏或因操作不当损坏的来回费用由买家自行承担

运费说明：1、报价均不含运费不含税运费由买家承担，我们会与物流公司洽谈，将运费降到最低，运费由买家到付

2、买家在提货时发现包装严重损坏或有被拆过迹象，应在物流公司拆开检查是否损坏或产品丢失，如发现产品损坏或丢失，不要着急把货提走，需及时与公司联系，由公司与物流进行处理

诚征全国各地足疗机代理商经销商：免加盟费、代理费、押金