

超供应针灸按摩垫子，！恒跃

产品名称	超供应针灸按摩垫子，！恒跃
公司名称	慈溪市长河镇恒跃塑料电器厂
价格	24.00/个
规格参数	品牌:恒跃 货号:01 主体材质:棉布+塑料+海绵
公司地址	慈溪市长河镇贤江村
联系电话	18658469740

产品详情

品牌	恒跃	货号	01
主体材质	棉布+塑料+海绵	规格	1
适用人群	通用	箱装数量	20

产品说明：按摩针垫 – 健康时尚的新潮流！

针垫不仅具有优良的品质，而且身为客户的您在使用我们的产品时始终能体会到其安全可靠的性能，这是因为：1. 塑料压迫点由无毒聚苯乙烯塑料制成2. 面料为100%纯棉特别是塑料针花与布是熔焊而成的不含任何成分胶水，完全符合人体对健康、环保的要求。且针花与布熔接安全可靠、不象胶水容易脱胶。

贴心针垫专家

针垫是那些希望更具活力的人的最佳选择！如果您感到筋疲力尽，缺觉，体能偏低，肌肉紧张、僵硬，头痛，背部或颈部疼痛，或者只是需要更好更充分的休息，那么针垫是您的不二选择。如果您不打算躺在针垫上，您还可以坐在针垫上进行每日的冥想。针垫上的环装物可以轻松将其挂在墙上。

体内会产生何种变化？10-15分钟 – 肽类激素开始流遍全身20-30分钟 – 体内的疲劳与疼痛感明显减轻30-40分钟 – 疼痛感明显缓和且活力增加

尺寸:74x44cm

按摩部位:颈部,脸,背部,腰部,腿,脚底

贮藏：您应卷起针垫，并将其放置于干燥，安全且儿童够不到的地方。清洁：可用热水清洗针垫。撤下泡沫橡胶垫。用餐具清洗剂或肥皂手洗。让针垫自行滴干旅行：撤下泡沫橡胶垫，仅随身携带布料部分。这样针垫占去您手提箱张过多的空间，而且您可以将布料直接放在床上。许多人外出时睡眠总是很差

。即使您在旅途中，针垫也能帮您在夜晚安然入睡。

一些常见问题的回答：

哪些人适合使用按摩针垫？-所有人！如果您感到筋疲力尽，缺觉，体能偏低，肌肉紧张、僵硬，头痛，背部或颈部疼痛，或者只是需要更好更充分的睡眠/休息，它都能极大地改善上述症状。如有医疗诊断或观察记录，请先咨询您的医生。

体内或产生何种变化？-结果是：输入身体肌肉和器官的血液循环及供氧量增加。血压降低，并且输入大脑的疼痛信号让身体释放出“感觉良好”的激素。如果您难以入睡，针垫能让体内内啡肽及催产素增加并产生放松效果，从而改进睡眠。您将获得充沛的体力，清醒的头脑，正常的血压，以及更健康的体魄。许多使用者证实其感到强烈的疼痛感明显缓解，而且夜间睡眠更加充足。

儿童可以使用这种针垫吗？当然，他们可以体验到与成人一样的益处，而且就寝前也可用针垫放松身心。但一定要在针垫上铺一块布料，因为儿童的皮肤更加敏感。另外，针垫不是玩具，务必在成人监督下使用。

针垫便于清理吗？是的。将少量洗涤剂混入温水中并手洗。彻底漂洗几次后在室温下滴干或在自然环境下风干。不要使用洗衣机或转筒式干燥机，可能会造成舒垫及机器损伤。

针垫如何影响皮肤？使用针垫后会在皮肤上留下细微的点坑，但通常在几小时，某些情况可能会是几天后消失。发红是因为血液循环提高，这说明针垫经校准的压迫点已开始发挥积极效用。

背部痤疮和伤疤，能不能使用这种针垫？可以。如果您的身体上有痤疮或伤疤，这并不影响针垫的使用。如果身体上有尚未愈合的开放性痤疮伤口或伤疤，我们建议您暂不使用针垫，因为这会使伤口恶化。除此以外均可使用。

偏胖，能使用针垫吗？可以，一点问题也没有。使用针垫时不会感到痛苦；您能体验到非常棒的感觉以及轻微的疼痛。这种输入大脑的疼痛信号可以让身体产生“感觉良好”的激素。您可以在针垫上铺一件薄t恤或一块床单以调整其压力。

躺在针垫上超过40分钟会不会有危险？不会。仅有的风险是您背部的痕迹加深，但过后很快就会消失。我们建议您每天躺在针垫上的时间不要超过两个小时，但偶尔长时间躺在针垫上也不会产生任何危害，很多人在针垫上睡着了。

感冒时是不是应该停止用针垫吗？正好相反，感冒时照样可以随意使用针垫！当传染病爆发时，针垫会产生较低的应力水平，因为身体免疫系统照要处理变细胞。（与您在假日时生病一样，身体需要一个自我修复的机会。）感冒前不可能采取任何防范措施，您只能任其发展并让身体慢慢自我修复。

如果患有或曾患有某种心脏疾病，能使用针垫吗？如果您患有心脏疾病，应谨慎使用针垫，一次躺几分

钟并寻找最佳感觉。但如果您患有低血压，请勿使用本产品。针垫在使用时会进一步降低使用者的血压，这将导致您在站起时昏厥。如果您患有突发性心脏病，也请谨慎使用。即便是微不足道的不确定性，也请在使用前咨询您的医生。

如果患有风湿性疾病，能使用针垫吗？当然能用。针垫对风湿性疾病患者的疗效非常好。

如果颈部/背部患有炎症，能使用针垫吗？绝对可以，如果血液循环能影响到发炎区域，它甚至能加速痊愈过程。

如果背部有感染伤口，能使用针垫吗？如果使用者背部有开放性伤口，我们不建议使用针垫