

触电急救模拟人,电力心肺复苏模拟人

产品名称	触电急救模拟人,电力心肺复苏模拟人
公司名称	上海博友科教仪器设备有限公司
价格	9500.00/套
规格参数	
公司地址	上海市松江区留业路29号一幢4层
联系电话	86-02162311471 13801820881

产品详情

上海博友科教仪器设备有限公司专业生产2010版心肺复苏模型，医用人体模型，急救训练模型，心肺复苏模拟人体模型，急救橡皮人模型，急救假人模型，驾校评估训练模型，卫生救护培训模型，企业安监培训模型，触电急救训练模拟人，电力安全培训模型，触电急救模拟人，电工安全考核训练模拟人，中小学安全教育训练模型，院前急救模型，CPR急救模拟人等2010版国际最新指南标准操作心肺复苏模拟人。咨询电话：021-62311471 62311472 网址：www.shboyou.com

触电急救模拟人,电力心肺复苏模拟人，是电力系统单位在培训触电时进行的急救训练用的人体模型，可模拟人体在触电后如何进行心肺复苏急救操作。

[BOU/CPR580触电急救模拟人（高级心肺复苏模拟人）](#)

采用美国心脏学会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，开发用于提高受训者在发生触电意外时应急能力最新急救培训模型。

功能介绍： 液晶彩显:人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示。

模拟标准气道开放； 人工手位胸外按压时：

1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 2、液晶计数显示；详细记录按压错误的各种原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的各种原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，

30：2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成

后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑液晶显示器一台；
豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 屏障面膜(50张/盒)一盒；
可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷 2010国际最新操作指南光盘1盘
现场急救常用技术使用手册1本 使用说明书一本。 保修卡、合格证；