

智能体检一体机 健康小屋自助体检机 卫生院健康一体机

产品名称	智能体检一体机 健康小屋自助体检机 卫生院健康一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-900A 适用范围:体检中心 卫生院 社区 养老等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

乐佳HW-900A智能体检一体机 健康小屋自助体检机 卫生院健康一体机，便携式健康体检一体机。

社区服务中心、卫生院健康体检用智能体检一体机，体检中心多功能智能健康自助体检一体机，身高体重血压心率脂肪健康一体机

乐佳HW-900A【技术范围】

身高测量：范围：60-200cm 精度：0.5cm

体重测量：范围：4-200kg 精度：0.1kg

血压脉搏测量：范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) \pm 3mmHg (\pm 0.4kpa) 内

脉搏：40-180次/分 脉搏数： \pm 5%

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

基础代谢：385kcal-5000kcal

水分含量：30%-70%

体温范围：34 -43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

血氧范围 70-100

主要功能：

- 1、机器立柱可以折叠，方便外出携带
- 2、自动测量身高、体重、BMI指数、体型、血压（高压、低压）、心率
- 3、测量结果语音播报、数码显示、热敏打印自动切纸
- 4、科学计算出被测者的标准体重范围，即BMI值
- 5、实时电子时钟和室内温度显示
- 6、可连接身高体重测量系统软件，通过RS-232把测量数据上传电脑（可选无线传输），在电脑上实时显示测量动态，并将测量结果生成EXCEL报表。
- 7、机身分开包装，方便运输。

操作指南：

- 1、身高体重：

点击主界面“身高体重”图标可进入身高体重测量界面，测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量

注意：进入测量状态后，为了更准确、快速的完成身高和体重的测量，应该站直、站稳、目光平视、挺直身体，不要晃动。

2、人体成分分析

点击主界面“人体成分”图标可进入人体成分测量界面，测量人体成分必须先进行登录并测量身高体重；测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量

注意：测量过程中请双手握紧脂肪把手

3、血压监测

点击主界面“血压”图标可进入血压测量界面，点击“开始测量”图标开始测量血压，测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量

注意：测量时请放松，不要动也不要说话

4、血氧测量

点击主界面“血氧”图标可进入血氧测量界面，测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量。

注意：测量过程中请将手指插入血氧仪，保持放松

5、体温测量

点击主界面“体温”图标可进入体温测量界面，测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量。

注意：请将体温仪对准额头二到三厘米处，扣动体温仪开关测量体温