

# 医用干燥柜干燥箱

产品名称	医用干燥柜干燥箱
公司名称	泰迪康医疗科技（江苏）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰州市高港区白马镇陆家村赵港组
联系电话	0523-86181235 18168532767

## 产品详情

医用干燥柜的主要技术特点及性能的详细描述

产品介绍：

DK-300L/400L/500L/600L型医用干燥柜（标准型）是我公司开发的一种大容量综合医用干燥设备，主要能满足医院的各类腔镜、显化瓶、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉导管、换药管、各种盘子，圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥，达到灭菌前的干燥指标外形美观，操作简单灵活。干燥温度设置范围0 ~110 ，干燥时间设置范围0秒~9999秒，用户可根据需求自由设置，该设备具有单门和双开门两种规格。本系列医用干燥柜改变了进风系统结构，强制热风送风循环(顶部出风，底部排风)，彻底解决了同类产品中以干燥导管类为主，干燥托盘内器械时下部干燥慢且干燥不彻底的问题。本设备采用相互独立的开放程序，真正实现了既可以作为干燥导管类的专用干燥柜，又可以作为干燥导管类、器械类的通用干燥柜，是一款性价比非常高的设备。适用范围：适用于消毒供应中心、手术室、检验科、口腔科等其他需要干燥物品的部门。

处理能力：可集中处理大量所需干燥物品，并可同时干燥手术器械和麻醉、呼吸物品。

控制系统：采用医用高精度PLC微电脑控制系统，操作灵活方便，工作安全稳定。实时高精度控制柜内温度与循环风量，操作更快捷灵敏，更好的实现了人机对话；中文显示记忆和设定干燥时候和加热时间。

空气过滤级别：0.5 μm

结构特点：

1、双开门型，符合感控要求。9层设计，可放9个标准打包大号或中号篮筐（层数可根据医院科室要求调整）。2、工作室采用优质304不锈钢制成，细菌附着率低，使用安全方便；并具有隔热夹层，有效防止热量损耗；门具有玻璃门视窗，可随时观察内部工作情况；合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小；工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；

3、采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，强制热风送风循环（内循环和外循环相结合，支持顶部出风及侧面出风）流动循环热风吹干，温度低，时间短。

#### 安装要求：

##### 1、设备的安装尺寸：

本型号医用干燥柜顶部的排气口高出外型尺寸中高度50mm.而排气管的正上方至少留有直径为100mm连接排气管的直径距离。

##### 2、对电的要求：

1. 本医用干燥柜电源参数：AC380V 50Hz 9kVA 20A 三相五线；
2. 本医用干燥柜采用的三相五线，院方在提供电源的同时保证接地线必须有效；
3. 电源要求：必须保证电源线的截面积不得小于6平方毫米；（建议采用电缆线）
4. 本医用干燥柜的电源线不采用插座而直接接入额定电流为40A的空气漏电保安器，对漏电保安器有严格的要求：漏电保安器必须采用4线的保安器（三个相线，一个零线），额定电流为40A，漏电电流在100mA-150mA之间；（建议使用的品牌：人民电器、德力西、正泰、施耐德、西门子等品牌）
5. 电源的控制盒距离医用干燥柜 1500mm；

##### 3、排气的要求：

- 1、排气管应选用内径为63mm耐高温的材料；（建议选用不锈钢管材）
- 2、安装排气管时不小于90度的弯度并保持排气管的水平安装以保证排气的畅通，
- 3、多台机器同时安装时，应分开安装排气管道，不可以并联安装；
- 4、排气管的出气口朝向应朝下，以免造成回风到机器里，在排气口的出气端应加装防风罩。

#### 设备参数：

##### 产品型号

DK-300L型

DK-400L型

DK-500L型

DK-600L型

##### 尺寸

外形:700\*400\*1950

舱体：600\*350\*1500

外形:700\*480\*2000

外形:700\*550\*2050

舱体 : 600\*480\*1650

外形:700\*600\*2100

舱体600\*520\*1700

开门方式 ( 可选 )

单开门/双开门

单开门/双开门

单开门/双开门

容积

300L

400L

500L

600L

重量 ( 空重 )

150KG

180KG

190KG

200KG

结构形式

立式

电源

AC 380V50HZ

环境温度

5~40

温度范围

40~90

升温时间（空载）

(RT+10) ~+90 15min

\*大功率

4.0KW

6.0KW

7.0KW

8.0KW

### 医用双门干燥柜配置清单

序号

类别

名称

单位

数量

备注

1

主机

医用干燥柜

台

1

2

托架

不锈钢托架

只

9

3

挂架

不锈钢导管挂架

4

文件

装箱单

份

5

合格证

6

备件

保修卡

7

使用说明书

8

电源

AC380V 50HZ

根

本单所列物品与  
箱内所装实物相符

设备控制系统面板：

采用医用进口高精度PLC微电脑控制系统，操作灵活方便，工作安全稳定。实时高精度控制柜内温度与循环风量，操作更快捷灵敏，更好的实现了人机对话；中文显示记忆和设定干燥时候和加热时间。

\* 本司生产的干燥柜具有的人性化及标准化设计、选材精良考究、操作简洁、方便适用、使用安全可靠、\*\*\*\*、干燥效果显著，深受专家、教授的，产品\*\*\*\*各地。 \*

联系电话：18168532767