

# 巴氏染色液、染色液 500ml

产品名称	巴氏染色液、染色液 500ml
公司名称	湖北泰康医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	检查项目:用于病理分析前脱落组织细胞的染色处理 净重:500ml
公司地址	孝感市长征路80号
联系电话	86-0712-2834848/2886688 13807295109

## 产品详情

检查项目	用于病理分析前脱落组织 净重	500ml
	细胞的染色处理	
药（械）准字	鄂孝食药监械（准）字2009第1400084号	

### 一、巴氏染色步骤（仅供参考）

1. 95 酒精固定 10分钟
2. 水洗 2-3遍（脱醇）
3. 苏木素 2-3分钟
4. 水洗 2-3遍直至干净
5. 碱水（饱和碳酸锂溶液）2-3分钟（返蓝）
6. 水洗
7. 95 酒精
8. 橘黄 1分钟
9. 95 酒精漂洗
10. 95 酒精漂洗

11 . 95 酒精漂洗

12 . ea50 染色 2.5分钟

13 . 95 酒精漂洗

14 . 95 酒精漂洗

15 . 95 酒精漂洗

16 . 无水乙醇

17 . 无水乙醇

18 . 无水乙醇 共5-10分钟（水脱干净）

19 . 二甲苯

20 . 二甲苯 共5-10分钟（充分透明）

细胞涂片后放入烤箱（温度70度）烤干或用电风吹干

细胞固定液（95%酒精配入3%的冰乙酸）固定30秒水洗

苏木素 染色60 ~ 80秒

根据颜色深浅延长或缩短时间

温水返蓝或流水冲洗 温水30秒或流水冲洗60秒

85%酒精 10秒

伊红 1-2秒

85%酒精 5秒 根据伊红的颜色深浅控制时间

95%酒精

100%酒精 60秒

100%酒精 60秒