

多功能电动病床 揭阳嘉春

产品名称	多功能电动病床 揭阳嘉春
公司名称	揭阳嘉春医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JC-801D 品牌:揭阳嘉春 种类:医用床
公司地址	揭阳市榕城区仙桥4号路（仙梅科技园）东洋路段
联系电话	86-06638613222 13417627456

产品详情

型号	JC-801D	品牌	揭阳嘉春
种类	医用床		

jc-801d多功能电动病床

规格：2120 × 980 × 520/750mm (l*w*h) 材质：床面、床架、床脚均采用冷轧钢板、管加工制造；并经酸洗、二次磷化、静电喷塑；再经恒温烘烤，表面涂层光亮牢固，质量达到国家标准。标配：进口电机，四片式钢塑护栏，五寸豪华中控轮，pe床屏，二节式点滴架，引流挂勾。选配：床垫，餐桌板。

一、使用说明：

- 1.该病床各个动作由电动推杆控制，通过操作器来控制病床各个动作，分别按下操作器各个动作按键，就能达到各个动作，即上床框架升降0~230mm，背板升角0~75° ± 5°，大腿板升角0~35° ± 5°，首尾倾斜0~12° ± 2°。到位时，由于电动伸缩杆有限位，各动作会停止，这时即松开按键。同时，由于丝杆丝母的作用，伸缩杆停在任何位置都不会滑动，能保证各动作停在任意位置都不会移动。前面结构图状态都处在各个动作的最高位置，往相反方向操作就可使各个动作处在最低位置。
- 2.小腿板跟随大腿板一起升降。
- 3.用手拉上护栏锁片,护栏即可自如放下,用手轻轻拉起护栏,护栏就能向上竖立并且能自动锁紧。
- 4.本床脚轮采用中控轮，当用脚踩下刹车轮刹车轴时，脚轮就被锁住，整床不能移动，反之，脚轮被解锁，整床就可以随意移动。
- 5.床的固定板下右手边装有紧急停止按钮，床的各功能的操作如出现失去控制时，可将此按钮按下，

停止一切运行。