

# 专业加工生产销售紫外线消毒车

产品名称	专业加工生产销售紫外线消毒车
公司名称	漯河郑澳医疗器械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:zaylc-II 品牌:郑澳 种类:医用车
公司地址	漯河市郾城区淞江路中段路北
联系电话	86-0395-2613666 13137557770

## 产品详情

型号	zaylc-II	品牌	郑澳
种类	医用车		

- 一.产品主要结构及性能1)该产品主要有底座、箱体、灯臂组成。2)型式为移动式;3)安全防护分类为i类;4)灯臂长度为:920mm±2mm,灯臂调节角度为00-1800,臂离地高度:1080mm±2mm。5)输入功率:150va二.主要技术参数1)正常工作条件:a)环境温度5-40oc;b)相对湿度80%c)电源220v±22v 50hz±1hz2)定时范围:0-120分钟,其中最大定时误差小于15秒3)消毒车采用的消毒灯管符合gb19258-2003的规定。4)熔断器规格fuses 5a×20。5)锁紧性能:杀菌车灯架锁紧,无松动现象;6)移动性能:脚轮活动自如,无阻滞现象;7)辐照强度:40w紫外线灯管辐照强度为 108.81uw/cm<sup>2</sup>;8)标记:有“永久贴牢的”“清楚易认”的标记;9)保护接地阻抗:电源输入插口的保护接地点和为保护目的与该点相连的所有其他部件之间的阻抗不大于0.2 10)外壳漏电流:正常状态 0.1ma;单一故障状态 0.5ma;11)对地漏电流:正常状态 0.5ma;单一故障状态 1ma。三.性能指标:移动紫外线杀菌车符合yzb/豫(漯)005——2010《紫外线消毒车》标准,紫外线杀菌灯符合gb19258\_2003标准四.使用寿命:移动紫外线杀菌车寿命20年,紫外线灯管寿命为1000小时。五.维护率及保养:出厂维护率100%,均为优质产品。紫外线杀菌车注意事项:1)定时器必须按顺时针方向使用,严禁反方向使用。2)使用前用进行通电试验,电源必须装有接地线,以防触电。3)消毒车在使用一段时间后,灯管表面如有灰尘,应用酒精棉球或纱布擦净灯管,以免影响效果。4)消毒灯工作时,人员必须离开现场,严禁在有人状态下使用,以防烧伤眼睛和皮肤。5)本产品于网电源切断装置为电源插头,在维修或待用是应拔去电源插头。6)经包装后的消毒车应存放在干燥,通风良好,无腐蚀性物质的室内。7)熔断器更换时,必须拔掉电源插头,以防触电。8)电容器更换时,必须有专业维修人员进行操作。紫外线杀菌灯注意事项:1)严禁在有人的情况下使用,专业人员进行紫外线强度检测时应注意防护。2)使用中紫外线灯的辐射强度低于70uw/cm<sup>3</sup>或累计使用时间超过1000小时应更换。3)定时使用酒精润湿的棉球或纱布擦拭灯管,灯管表面有灰尘,油污时应随时擦拭。4)电源电压的波动范围,不得超过5%,使用的镇流器必须是电感镇流器,否则将影响灯的使用寿命和紫外线辐照强度。

