

一次性输液加温器外壳 塑料

产品名称	一次性输液加温器外壳 塑料
公司名称	天长市康乐加温器有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:一次性输液加温器外壳 材质:塑料
公司地址	安徽省天长市杨村镇富民路18号
联系电话	7761021 13705506168

产品详情

分类 一次性输液加温器外壳 材质 塑料

一、产品简介

在临床输液过程中，由于大量的药液从体外直接进入人体血管，偏低的药液温度常常导致病人四肢发冷、麻木、疼痛，严重时甚至出现血管痉挛等症状。若长期进行低温输液，容易发生血管硬化，尤其春、秋、冬季节更为明显。如若通过输液加温器加温后，则能解决由于药液过冷使病人普感不适这一状况；另外，通过药液加温，药物能在输液中溶解得更彻底，更易被人体吸收。

本产品具有输出热量恒定。加温迅速、操作方便、安全可靠、无毒无味、无菌及无副作用等特点。

产品详细信息说明

二、使用范围

该产品用于临床输液时给液体加温或用于保暖、热敷，使用后可作为养花肥料。

三、产品主要结构

主要由发热材料及高强度聚乙烯外壳组成。

四、产品性能

- 1、加温器撕封后10min。加温器壳体温度不低于50℃，持续温度达3h
- 2、加温器应有良好的强度，从1.5m高从自由跌落，应不发生破裂现象。

五、使用方法

- 1、撕开真空包装、让通气孔与空气相接触。
- 2、将输液管下端绕于一次性加热器凹槽内，扣住加热器上端搭扣
- 3、调节输液速度2—4ml/min左右，温度可达10 左右。

六、注意事项

- 1、该产品为一次性使用。
- 2、环境温度在20 以上时不必使用。
- 3、在输液过程中，如中途停止输液二分钟以上，应先取下加热器，继续输液时再安装上。
- 4、输入血白蛋白禁止使用。

七、有效期限二年。

八、贮存

本品应贮存在相对湿度不超过80%，不腐蚀性气体和通风良好较干燥的室内。

九、运输

运输要求按订货合同要求规定，应保持清洁避免日晒雨淋。

十、质量承诺

本品在遵守储运、贮存和使用规则的条件下，产品质量问题、不能发热的产品，由本公司调换。