

康乐一次性输液加温器

产品名称	康乐一次性输液加温器
公司名称	天长市康乐加温器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省天长市杨村镇富民路18号
联系电话	7761021 13705506168

产品详情

一、产品简介

输液在临床治疗中，相当广泛。在输液过程中，大量的药液从体外直接通过输液器进入血管，因药液温度偏低，常常导致病人四肢发冷，甚至麻木、疼痛，严重时会出现血管痉挛等症状，尤其在春、秋、冬季中风为明显。使用一次性输液加温器，可以解决由于药液过冷而使病人普感不适这一状况。本产品具有输出热量恒定，操作方便，安全可靠，无毒，无味，无菌及无副作用。

产品详细信息说明

二、使用范围

供一次性使用输液器输流时加温用。

三、主要结构

主要由发热材料及高强度聚乙烯外壳组成。

四、性能指标

- 1、加温器撕封后10min。一开始发热，并能持续3h,其壳体温度应不低于50 。
- 2、在环境温度5 ~ 10 ，输液速度为2ml/min ~ 4ml/min时，输液器流出液温度应不低于12 。
- 3、在环境温度15 ~ 20 ，输液速度为2ml/min ~ 4ml/min时，输液器流出液温度应不高于33 。
- 4、加温器应有良好的强度，从1.5m高从自由跌落，应不发生破裂现象。

五、使用方法

1、撕开真空包装、让通气孔与空气相接触。

2、将输液导管嵌入螺旋凹槽内转动上下两个顶盖的腰形孔，使挡板挡住输导管，通过移位固定在加温器的壳体

六、注意事项

1、该产品为一次性使用，用后销毁。

2、环境温度在20 以上时不必使用。

3、在输液过程中，如中途停止输液二分钟以上，应先取下加温器，继续输液时再安装上。

4、输入血白蛋白禁止使用。

七、有效期限

经真空包装的加温器遵守储运、贮存规则的条件下，自出厂起质保期为二年。

八、贮存

本品应贮存在相对湿度不超过80%，不腐蚀性气体和通风良好较干燥的室内。

九、运输

运输要求按订货合同要求规定，应保持清洁避免日晒雨淋。

十、质量承诺

本品在遵守储运、贮存和使用规则的条件下，自出厂之日起，有效期为二年，产品质量问题、不能发热的产品司调换。

small and lightweight, the self-powered version of infusion warmer, supplies heat to infusion set tubing, protects patients from hypothermia and decreased oxygen availability.

heating methods:

ripping off the package, the warmer works once exposed to the air.

place the tubing inside the “ s ” shaped channel, fasten by the cap

the fluid is warmed to approximately 10 at the flow rate of 40ml/min

features:

no power required

disposable

easy to use

sets up in less than 30 seconds

fast warm up time

no special training

lightweight and portable (ideal for remote locations or trauma retrievals)

safe

the warmer maintains heating for 3 hours

caution:

in case of temporary cessation of infusion for two minutes or more, take it down and re-fix it after resuming

disposable, discard after use

don ' t fill in the hole for radiating

ready to use in 5-10 minutes

haemoproteins in fusion is forbidden.

condition of storage

store in a sanitary enclosure with maximum relative humidity of 80%. noncorrosive gas and proper ventilation.