

银色身体温灸棒/艾灸棒/经络温灸器/配7mm艾条

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 银色身体温灸棒/艾灸棒/经络温灸器/配7mm艾条 |
| 公司名称 | 郑州市金水区时时康医疗器械商行 |
| 价格 | 15.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:福元 型号:7MM 产地:广州 |
| 公司地址 | 中国 河南 郑州市金水区 黄河路5号院 |
| 联系电话 | 86 0371 63319965 15538706511 |

产品详情

| | | | |
|------|----|------|-----|
| 品牌 | 福元 | 型号 | 7MM |
| 产地 | 广州 | 箱装数量 | 100 |
| 贸易属性 | 内贸 | 产品类别 | 温灸器 |

产品名称：银色身体用温灸棒产品规格：最长约18.5cm、头部直径约2.4cm。包装形式：礼盒包装、随盒赠送配套艾条。产品特点：本品主体由金属制成，转动顺滑，外形美观，经久耐用。产品功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

- 温灸棒操作方法：
- 1、将艾条一端点燃，将燃端放入温灸棒中。
 - 2、轻压温灸弹力，使艾条落至顶端，以水平或倒置动作调整艾条与顶端的距离，保持温度适度。
 - 3、以手掌试温度高低，确定温度适中，即可开始温灸。
 - 4、每次灸15分钟，使穴点经络疏通皮肤光滑，红润。

温灸按摩的注意事项：

- 1、温灸时先灸左方，再灸右方。
- 2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素；
- 4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；孕妇禁用；身体发炎部位禁灸!