

牧乐牌LZT-2D可调连续注射器 容量0至2ml

产品名称	牧乐牌LZT-2D可调连续注射器 容量0至2ml
公司名称	郑州牧惠饲料有限公司
价格	45.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 适用对象:犬、兔、鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑 用途:医用设备
公司地址	郑州市金水区柳林镇杨槐村北郑州桑园饲料兽药批发市场6区11号
联系电话	86 371 63472228 13937170441

产品详情

是否提供加工定制	否	适用对象	犬、兔、鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑
用途	医用设备	品牌	牧乐
型号	LZT-2D	产品规格	0-2ml
外型尺寸	15cm(把) × 11cm	包装说明	塑料盒装
控温范围	常温	类型	不锈钢连续注射器
产品类型	全新		

可调连续注射器

lzt-2d型

(0-2ml)

专利号：200420096854.6

执行标准：q/wtq001-2003

计量许可证：鲁制10000007

使用说明

尊敬的用户：

欢迎您使用“牧乐”牌Izt-d型连续注射器，本产品是一种新型注射器械，它具有使用方便、省力、操作灵活、剂量调节范围大等特点，广泛应用于家禽、畜类防疫及注射治疗类方面，产品通过了全国畜牧兽医器械质量检测中心检测，是禽场、牧场及兽医必备的理想注射器械。同时我厂郑重承诺：如有质量问题，包退、包换，让您买的放心、用的舒心，希望广大同仁为我们提出宝贵意见。

制造商：威海市正泰机械有限公司

“牧乐”牌Izt-2d型（0-2ml）连续注射器，是一种全金属注射器，此种注射器最大的特点是省力，使用寿命长，操作舒适，适合饲养数量较多的用户，目前大型鸡场均采用这一产品。本款连续注射器主要部件采用不锈钢材质制作。

一、消毒方法：

注射器使用前应消毒

将注射器吸满水后，放入水中煮沸10分钟（不要接触锅底），然后打出注射器中的存水。

二、使用说明及剂量调节方法：1、将插瓶针、放气针分别插入药瓶。2、把导管用插瓶针接到注射器接头上，先将标尺调节螺杆拧在1-2ml的位置上，（标尺刻度值靠螺母底平面）扳动扳手，打出药液后再调整标尺调节螺杆至所需剂量的位置，将锁紧钉拧紧。3、装上针头空打几次即可使用。

三、保存方法：

注射器用完后，用蒸馏水（或酒精）清洗（用蒸馏水多打几次），晾干后用干净布包好，放阴凉处保存。

四、注意事项：

1、注射器长时间放置，可能会出现不吸药现象，这并不是注射器的质量问题，而是由于注射器调整或使用后，有液体残留致使吸入阀与接头粘连在一起，只需用干净细物通过接头上小孔轻轻把吸入阀顶开即可。如仍不吸药则可能是释放阀与主体也被粘连在一起，可卸下锁紧杆，把释放阀与主体分开，然后重新装好。2、清洗、更换部件时注射器各紧固处必须拧紧，各密封处不得有泄漏现象。五、附件：插瓶针、放气针各一支，导管一条，转向阀、弹簧各2个，垫圈2个。

订购注意:

本产品支持支付宝担保交易，可最大程度保证买卖双方交易安全。

本产品每把重约350g（不含包装），加上包装重约450g，一把起订，售价48元/把，每个包装箱20把，整箱购买45元/把。

一般采用圆通或申通快递发货，快递费首重10元，续重5元，一次购买2把以内，10元运费即可。订购数量较多时采用物流公司发货，运费需由买家承担，河南省内运费约5-10元/件，河南省外运费约10-35元/件。

联系方式:

电话：0371-60960228 手机：13503833001/13937170441 qq：129641

