

康必利多酶清洗剂

产品名称	康必利多酶清洗剂
公司名称	深圳市安多福消毒高科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市盐田区北山道146号
联系电话	86-075588829606 13590362105

产品详情

康必利®多酶清洗剂

主要成分及用途：

本品由多种高活力、高纯度的进口酶以及表面活性剂、酶稳定剂、抗菌因子等制成。

用于内窥镜、牙科、妇产科及其他内外科器械的清洗。

用法：

按以下比例稀释配制清洗液浸泡清洗物品

污染程度	稀释比例（理想水温：30 °c~70 °c）
污物变干	1：100（10毫升酶洗液加1升水）
高度污染	1：200（5毫升酶洗液加1升水）
中度污染	1：300（3.3毫升酶洗液加1升水）

轻度污染

1 : 400 (2.5毫升酶洗液加1升水)

浸泡洗涤完后，再用清水冲洗干净。弃去废液，清洗容器。

需用化学消毒时，应先用本品洗涤，再用清水冲洗干净，然后使用化学消毒剂，以防止蛋白质污染物变性，造成凝固、粘结。