

软式医用内镜微生物限度检测仪EJ-NJ101

产品名称	软式医用内镜微生物限度检测仪EJ-NJ101
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	17890.00/件
规格参数	泵流量: 1200ml/min 排液软管规格:内径 10mm硅胶管 噪音: 60dB(负载状态)
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

规范要求

依据标准WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》

依据国标GB15982--2012《医院消毒卫生标准》第A5.3、A6.3条款

产品原理

内镜由于其独特的结构特点，较难进行清洗消毒，存在引发患者交叉感染的隐患，因此常规开展内镜清洗消毒效果的监测，评价其消毒是否达标尤为重要。《中国药典》2015版要求使用薄膜过滤法对纯化水微生物限度进行检查，该方法在《医院消毒卫生标准》（GB 15982—2012）消毒后内镜的监测中亦有提及，50mL洗脱液量比10mL能更充分接触到内镜的内表面，结合直接接种法、薄膜过滤法和菌落计数将更客观且科学有效地评价内镜消毒质量。

消毒后内镜采样方法为薄膜过滤法：取清洗消毒后内镜，采用无菌注射器抽取50mL含相应中和剂的洗脱液，从活检口注入冲洗内镜管路，并全量收集（可使用蠕动泵）送检。将洗脱液充分混匀，取洗脱液1.0 mL接种平皿，将冷至40 ~45 的融化营养琼脂培养基每皿倾注15mL~20mL， 36 ± 1 恒温箱培养48h，计数菌落数（CFU/件）。将剩余洗脱液在无菌条件下采用滤膜（0.45 μ m）过滤浓缩，将滤膜接种于凝固的营养琼脂平板上（注意不要产生气泡）， 36 ± 1 恒温箱培养48h，计数菌落数。

当滤膜法不可计数时：菌落总数（CFU/件）= m（CFU/平板） \times 50

式中：m为两平行平板的平均菌落数。

当滤膜法可计数时：菌落总数(CFU/件) = m (CFU/平板) + mf (CFU/滤膜)

式中：m为两平行平板的平均菌落数；mf为滤膜上菌落数。

应用范围

医疗卫生行业的内镜检测取样、微生物限度检测等

主要特征

- 1、内置微型高性能隔膜泵，无需抽滤瓶，大大减少对操作台空间的占用，使用更方便；
- 2、带指示灯的按钮开关控制，操作简单直观；
- 3、简洁的内部管路，没有微生物得以滋生的死角，便于清洁消毒；
- 4、不锈钢机壳经镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒。

技术参数

型号 EJ-NJ101

泵流量 1200ml/min

排液软管规格 内径 10mm硅胶管

噪音 60dB(负载状态)

功率 25W

电源 AC 220V/50Hz

外形尺寸 13x20x14cm（长×宽×高）

重量 2.5kg

适用耗材 内镜检测取样器

选择我们的理由：

- 1.我们是专业的实验仪器厂家，从业多年，经验丰富，产品****，产品的口碑也非常好，致力于打造好每一款产品。
- 2.我们拥有专业的售后服务，公司从事仪器行业多年，有一批经验丰富的工程师，能够及时，快速处理各种问题，为客户解决后顾之忧。
- 3.凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，卖出的每一款产品都严把质量关，让客户买的放心用的放心。
- 4.我们的实验仪器属于精密设备，凡是购买我们的产品，质保1年，零配件齐备，有任何问题提供配件保养维护。
- 5.我们紧跟行业标准，及时更新符合要求的实验仪器。

6.上海恩计仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的厂商，秉承客户至上原则，十年如一日，始终坚持初心，为科研服务。

7.欢迎大家咨询：网站: www.enjiyiqi.com 电话:132625-81609 企业QQ:12519-39407

上海恩计仪器是专业的实验室仪器设备直销商，为广大客户提供微生物限度检测仪销售服务，品质保证，终生维护!

- 1、保修期从用户签字接受该仪器时起算，为期一年。保修期内由于仪器质量问题引起的相应维修服务费用和备件更换费用均为上海恩计负责，并负责终身维护。
- 2、保证为用户提供维修服务，保证终身供应零配件，质保期满后，以成本费供应所需零配件及耗材，免收服务费。
- 3、维修响应时间迅速，保证在1-2小时内电话技术指导，接到故障电话后必定12小时内做出解决方案。
- 4、一周内因服务不完善留下的任何问题，公司将在3-5天内免费上门做处理。
- 5、提前预约安装上门服务，专业技术人员会被安排在您方便的时间上门安装服务。
- 6、公司设有售后服务中心，建立健全售后服务体系和服务流程，配有专业的技术人员，专业高效为客户解决问题。