

高级全身心肺复苏训练模拟人 医学模型 急救训练模型

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高级全身心肺复苏训练模拟人 医学模型 急救训练模型 |
| 公司名称 | 上海益联科教设备有限公司 |
| 价格 | 5300.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市徐汇区肇嘉浜路201弄3号1501室 |
| 联系电话 | 86-02164188321 13701988499 |

产品详情

该产品采用美国心脏学会（AHA）2005国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，并在第二代的基础上进行升级，开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的经济型第六代新产品。

用户可根据自身需要选择执行标准：执行标准1：2010年国际心肺复苏(CPR)指南的最新标准
执行标准2：美国心脏学会(AHA)2005国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准 主要功能：

模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压显示报警：1.

按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。2. 按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4~5<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。人工口对口呼吸（吹气）显示报警：1. 吹入的潮气量 500ml~600ml 的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。2.

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30:2个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分；操作方式：训练操作。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压舒服电源6V。材料特点：面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：高级复苏全身人体模型一具；高级显示器一台；豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置二套；可换面皮一只；保修卡、合格证；使用手册一本；2010国际最新操作指南光盘1盘；

友情提示：您只要致电：021-64188321 021-64188291 021-64176268 021-64188033

我们可以帮您推荐符合您要求的[高级全身心肺复苏训练模拟人 KAS/CPR280](#)相关产品！