

新减肥仪器|减肥仪器厂家|家用减肥仪器

产品名称	新减肥仪器 减肥仪器厂家 家用减肥仪器
公司名称	凯美特科技发展公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西大街126号现代星苑816
联系电话	0371-60156346 18937186348

产品详情

脂肪爆破仪

本美容仪器的使用是对健康肌肤的护理为前提、以美容为目的，禁止以治疗为目的使用或销售。原理和功效采用电脑微控技术(AVR微型计算机芯片)机动智能控制前后滚轴，精确的力学及真空负压吸力与镭射光纤，加入40KHz强爆波设计，加大深层顽固脂肪的分解能力；在身体各个部位进行反复韵律式深层按摩。把表皮、真皮及皮下脂肪层向上提起，并利用脉动滚轴夹起并伸展不同皮层的结缔纤维，通过三个不同方向来按摩，能有效的分解及打散皮下脂肪团防止蜂窝组织聚积，脂肪细胞经过积压及按摩后转化成脂肪酸经过淋巴系统代谢掉，而脂肪内的毒素也一样利用淋巴系统排出体外，达到塑体的目的。

1. 负压滚爆光纤头 强声波爆脂头 配件功效负压滚爆光纤头:通过负压效应,采用生物电波使皮下脂肪层随气流的走动带动脂肪的流动,再由生物电波定位从而打到移脂,定脂的功效。皮肤组织通过负压吸力与滚轮接触产生双频RF,从而使皮肤内部组织发热,燃烧脂肪达到瘦身纤体的效果 2. 强声波爆脂头:采用超声波机械原理、超声导入、温热作用,促进产品的吸收将减肥产品快速导入体内,使产品更好的发挥作用,促进血液和淋巴循环。40多种名贵中药从神厥穴随机导入,引发深层脂肪酸的分解排毒,滑肠润肠,同时将多余的废物和被燃烧的脂肪迅速带走。

3. 使用负压滚爆光纤头: 1) 按设定键, 2) 将光标3) 调到“RF”位置, 4) 调功率调节键, 5) 将RF功率选择到6-9档(要按客人感觉调节), 6) 温度不7) 宜过高, 8) 防止烧伤皮肤。 9) 将光标10) 移到Vacuum(负压)功能, 11) 按模式键选择吸放的韵律时间, 12) 第一档为长吸状态。 13) 当RF负压功率和模式选择好以后, 14) 按工作/暂停键, 15) 工作时间开始倒数, 16) 滚爆光纤头进入工作状态, 17) 美容师按正常操作程序操作

4. 操作结束后, 取下相应的配件, 清洁好配件, 关掉电源。空气过滤器要一周清洗一次, 安装时要调紧, 以防漏气。

5. 仪器未经允许, 不得私自拆卸。

6. 孕妇禁做。 7. 重大手术患者、糖尿病患者禁做。 8. 有任何金属在体内者. 禁做。

9. 女性生理周期内, 最好不做. 产品服务与维修本机器自购买日起(凭票据)主机保修一年, 一年内出现质量问题免费修理, 一年后如出现问题就要收取维修费用。配件保修六个月, 六个月内出现质量问题, 免费修理, 六个月后收取零件维修费用。其他已过保修期限的, 亦可负责维修, 收取零配件及消耗品的成本费。

10. 对以下使用个人原因造成的故障, 不提供免费保修服务。 1) 擅自拆装改装本产品造成的故障; 2)

使用不慎摔打跌落而造成的故障；3) 因缺乏合理保养而造成的故障；4) 没按使用说明的正确指导而造成的故障。 注意事项

- 1.皮肤有伤口者，避开伤口或不做。
- 2.患有癫痫症者禁做。
- 3.心脏病患者(如心律不齐者),特别是带有心脏起搏器者禁做。
- 4.癌症患者禁做
- 5.传染病患者禁做。

感谢您对凯美特仪器公司的信赖及支持，我公司十分重视产品售前和售后服务，以先进的技术，一流的技术服务人员来为您提供最快捷，最热情的服务，服务承诺如下：

第一条：售前咨询 1、如果你对我公司的产品感兴趣，有购买意向，我们可以为你提供详细的资料，可以来电咨询，以便您对我们产品做详细的了解。也可以满足客户的要求到使用现场去参观。
2、我们可以根据您的要求为您设计适用于您要经营的项目。

第二条：使用指导 3、在你购买本公司的产品后，我们派专业技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训，待仪器运转正常，员工能熟练操作后，我司技术人员方可离开。

第三条：机器维护 4、我公司的所有产品从你购买日起保修期为一年，在保修期内，我公司派专业技术人员及时上门无偿维护，一切费用由我公司承担。（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外） 5、实行终身跟踪服务制

联系人：张经理 咨询热线：18937186348 QQ：1659177678

电话：0371-60156346

传真：0371-61622202

客服邮箱：kaimeiteyq@163.com 1030745353@qq.com 网址：<http://www.kaimeitemr.cn>
<http://www.meirongyiqi8.com> 地址：河南省郑州市西大街126号现代星苑816