

美容仪器厂家|新美容仪器|美容院专用美容仪器

产品名称	美容仪器厂家 新美容仪器 美容院专用美容仪器
公司名称	凯美特科技发展公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西大街126号现代星苑816
联系电话	0371-60156346 18937186348

产品详情

E光+激光+黑脸娃娃（三合一）普通光能(激光光)在治疗过程中，基于光的选择性吸收原理，光能在穿透表皮时，会被表皮色素大量吸收，高能量或者深色皮肤治疗时风险较大。另外由于大部分光能被反射和折射，真正到达并被靶组织充分吸收的能量仅占30~40%，所以，为了达到治疗目的，就需要提高能量。但表皮色素对光能的大量吸收，限制了在治疗时能量选择不宜过大，从而影响了单次治疗的效果。

由于E光在治疗过程中，光能主要用于调整靶组织的阻抗值，引导RF(射频)能量集中作用于靶组织。光能不是主要治疗能量，从而避免了主要能量的反射和折射问题。基于RF(射频)的特性，RF(射频)在皮肤组织产生的热效应取决于电流密度，电流密度的分布取决于皮肤组织的阻抗分布，组织温度越高阻抗越低，电流密度越大，产生的热效应越高；反之，组织温度越低阻抗越高，电流密度越小，产生的热效应越低。所以靶组织对起主要治疗作用的RF(射频)能量的吸收并不受表皮色素屏障的影响，RF(射频)能量可以充分作用于靶组织，得到良好的治疗效果。E光嫩肤脱毛系统为一体的多用途综合系统。E光通过双极射频输出1兆的电(磁)波,对皮肤的胶原纤维及胶原质进行加热,使胶原纤维受热收缩,即时表现为皮肤变紧,皱纹和妊娠纹形态改善,最明显的是面部提升表现;随后真皮层产生的热效应使胶原增生,随着胶原数量的不断增加,使得细胞重新排列,从而修复老化受损的胶原层,最终达到紧肤除皱,改善妊娠纹,面部提升的作用。

治疗范围：SK系统：祛黄褐斑、雀斑、老年斑、各种色斑、脱上下唇毛、腿毛、腋毛比基尼部位、深层收毛孔、美白祛黄、祛痘、祛痘印、祛红血丝、冰点电波拉皮。
C6系统：一次就能缩小毛孔、祛除暗黄、美白肌肤、控油祛痘祛除面部斑点瑕疵、改善肤色暗沉。洗眉、洗纹身、洗眼线、祛除太田痣，真皮斑、终结胎记。

系统特点和优势：

E光、RF、激光的完美组合，、祛斑、嫩肤、祛皱、脱毛、黑脸娃娃、洗眉、洗胎记、一机多用、效果互补、方便快捷、智能界面、随意选择。技术参数：SK枪头：RF频率：10MHZ RF功率：100W 放电间隔：2-4S RF时间：500-9500ms 脉冲宽度：1-9.9ms 能量密度：10-50J/cm 脉冲个数：1-6 脉冲间隔：5-99ms 光斑面积：8*40mm 输入功率：600/800/1000W 储电量：20000/30000/40000uf C6枪头激光类型：Nd:YAG 脉冲方式：调Q 光斑面积：1-6mm可调 脉宽：8ns 波长：1064nm

(柔肤镭射) /532nm 频率：1-8HZ

制冷方式：水冷+风冷

五、治疗特点：E光治疗每次时间约20—30分钟，两次治疗一般间隔3—4周（21—28天）

1：色斑治疗：表皮斑快速见效，一般一次就可以见效，经过疗程3—5次的治疗后达到显著的效果，深层斑：慢，能量高会结痂。

2：毛细血管扩张：一般治疗后红血丝明显减轻，有些患者要经过几次治疗以后才会有明显的改变。

3：脱毛：一次见效，完全祛除三次左右（生长期，静止期，退行期）。

4：祛痘，1--2次见效，严重者要几次效果才明显。

五，E光美容仪治疗优势

1.进口宝石晶体导光系统,冷却性能更好,更舒适,更持久。

2.*以色列*半导体冷却系统,给皮肤表皮提供-10度。

3.多功能:脱毛,嫩肤,祛斑.祛红血丝,祛皱纹。

4.治疗头按照人体工程学设计，更小巧，更方便，减少操作者疲劳。

5.采用美国8倍大气压光源。

6.外壳采用高纯度工程ABS塑料，防漏电，更安全。

色素性皮肤病变和混合色素形成的色素沉着。有效治疗黑、兰、棕、红、褐等色素沉着。可祛除纹眉、纹唇、纹眼线、唇线及咖啡斑、雀斑、老年斑等外伤性色素沉着的红、青、兰、紫、黑、棕、褐等多种色素。特点： 1、全新冷却系统，确保仪器单次更长时间工作

2、全固态宝石机芯（增强型）能量更大，仪器性能恒久稳定，真正降低客户成本。

3、液晶屏界面设计，操作方便快捷易掌握，整机抗振性能佳，适于客户移动使用。

4、瞬间爆破高新激光技术，国际标准生产，严格技术检测，真正绿色环保产品

5、能量连续可调，输出功率高，治疗范围广，紧缩疗程时间，精细治疗各病症，效果佳

6、激光手术无需麻醉，无交叉感染，绝不损伤正常皮肤，祛除色素彻底，绝无痕印

7、术后反应极轻微，无需服用药物，恢复快，不影响日常工作生活。

8、微电脑自控模块，优等材料装配，免除客户烦琐维修的后顾之忧

9、顾客易接受、病源广、疗程短、效果佳、投资回报率高 二、产品特点:

不流血，无需麻醉 操作简便，治疗时间短 瞬间爆破的高新激光技术

标准的模块化设计，维修方便 全固体激光，国际标准生产，性能稳定

不破坏毛囊，不损伤正常皮肤，不产生疤痕

三、1、Q开关1064nm激光可有效祛除黑色纹身、纹眉、纹唇、眼线及外伤性色素沉着和雀斑等。

2、Q开关倍频532nm激光适合治疗红色或棕褐色纹身，纹眉，唇线，眼线。并可有效淡化红色或棕褐色胎记及各类浅层斑等。 四、治疗原理：利用激光的爆破效应，激光有效的穿透表皮，能够到达真皮层的色素团，由于激光的作用时间极短（仅几个纳秒）能量极高，色素团在瞬间吸收了高能量的激光后迅速膨胀，破裂成细小的颗粒，这些小的颗粒被体内的巨噬细胞吞噬后排出体外，色素逐渐变淡消失，最终达到治疗的目的。激光洗眉机，就是便携式被动调Q的YAG激光，这种激光要分双掺还是单掺的，电源有带预热的和不带预热的，

这两者决定了激光器的能量和激光器的使用寿命，激光束的波长决定了镀膜层的厚度和颜色的物质，电

能的脉冲个数和数码程序控制的开关电源转换成光能，这种光能是有高压脉冲电压透过氙气产生的强光源，光源被集束棒集束后，这种集束棒的物质和聚焦镜反射过被动调Q的晶体，光变得精准单一了，能量的好坏，跟光电器件的配置很重要 感谢您对凯美特仪器公司的信赖及支持，我公司十分重视产品售前和售后服务，以先进的技术，一流的技术服务人员来为您提供最快捷，最热情的服务，服务承诺如下：

第一条：售前咨询 1、如果你对我公司的产品感兴趣，有购买意向，我们可以为你提供详细的资料，可以来电咨询，以便您对我们产品做详细的了解。也可以满足客户的要求到使用现场去参观。
2、我们可以根据您的要求为您设计适用于您要经营的项目。

第二条：使用指导 3、在你购买本公司的产品后，我们派专业技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训，待仪器运转正常，员工能熟练操作后，我司技术人员方可离开。

第三条：机器维护 4、我公司的所有产品从你购买日起保修期为一年，在保修期内，我公司派专业技术人员及时上门无偿维护，一切费用由我公司承担。（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外） 5、实行终身跟踪服务制

联系人：张经理 咨询热线：18937186348 QQ：1659177678

电话：0371-60156346

传真：0371-61622202

客服邮箱：kaimeiteyq@163.com 1030745353@qq.com 网址：<http://www.kaimeitemr.cn>
<http://www.meirongyiqi8.com> 地址：河南省郑州市西大街126号现代星苑816