

# 医用恒温柜/手术室用恒温箱

产品名称	医用恒温柜/手术室用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68572.00/件
规格参数	介绍:医用恒温箱 温度:0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用恒温柜/手术室用恒温箱产品说明-

主要是加热医用盐水、冲洗液和静脉注射液的。手术室内部的温度在22~24℃，在给患者做手术室时患者身体是裸露的，如果再用冰冷的液体冲洗患者伤口或是输入冰冷的静脉注射液很容易引起低体温症，会加大手术风险。

医用恒温柜/手术室用恒温箱产品参数：

【型号】FYL-YS-138L【输入电压】AC220V  
【制冷功率】85W【加热功率】170W【恒定温度】4-38℃【净重】40kg【外形尺寸】540x545x833mm【容积】138L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10℃~38℃环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.噪音设计：噪音低于39dB(A)，压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发面积，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

医用恒温柜/手术室用恒温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温柜/手术室用恒温箱相关-观察液体加温应用于预防剖宫产后寒战的效果。方法选择择期行剖宫产的健康初产妇，ASA ~ 级，共86例，随机分为A、B两组，A组实验组，所有A组产妇入室后所用补液均使用液体加温仪将液体加热至38 ，B组对照组，所用液体均为常温。结果 A组寒战发生率显著低于B组 ( $p < 0.05$ )。结论液体加温对剖宫产后寒战的发生有一定的预防作用。医用恒温柜/手术室用恒温箱