

# 桤亚高端轮椅秤 透析专用电子体重秤

产品名称	桤亚高端轮椅秤 透析专用电子体重秤
公司名称	上海桤亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:桤亚 型号:SCS-YCH 量程:300kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

## 产品详情

### 桤亚高端轮椅秤 透析专用电子体重秤

舒适的轮椅称量源于专注细节

1、安全、多功能、美观的设计使得轮椅秤为医疗称重领域建立了标准。为称重坐轮椅的病人所特别设计,在医院、透析中心、康复中心和疗养院,为其使用者和病人提供了\*大的舒适度和安全性。

2、量程 可设计调试和极大的称重能力和容易上下的坡道

凭借 300 公斤的称重能力,即便是大体重病人,这种轮椅秤也可便捷地称量其体重。超低的平台和自动调节的斜坡板,便于轮椅上下。侧面的安全挡板和蓝色的防滑表面设计为称重者提供了多一份的安全。保护称体,提高使用寿命。

3、一体化的预设除皮功能

一体化的预设除皮功能利用其内部重量存储器可以先将轮椅的重量储存,只需按一下按钮就可将轮椅的重量减去,自动计算出病人的净重。

4、配储存芯片的 seca 665C 型

另外,由于配有储存芯片,seca 665C 型能储存并识别不同的轮椅重量。这个储存芯片可以通过专用固定器安装到不同的轮椅上。

5、易于调水平和搬运

旋转式液晶显示屏可显示大字体数字,使病人和护理员均能很容易地读取数据。这款秤还有一个很重要的优点是可移动性和搬运。

使用可拆卸结构、方便运输，安装在地面上就可使用。4支调节脚可调水平高低。

轮椅电子秤使用注意事项：

- 1、不要超过zui大称量范围，如果负载过重，会毁坏产品。
- 2、轮椅电子秤是精密仪器，使用前请先参考水平仪调整其水平位置。
- 3、请在常室温下使用，不要放在过冷或者过热的环境中。
- 4、避免剧烈摇晃、落地或震动，确保轮椅体重秤的！
- 5、请把轮椅电子秤放在清洁的环境中，灰尘、泥土、潮湿、震动、气流以及至于电器附近都会影响产品的精度。

轮椅体重秤，透析专用秤，医用轮椅秤，电子透析秤，轮椅秤厂家