

兴优医用射线防护喷剂放疗皮肤保护剂说明书注意事项不良反应

产品名称	兴优医用射线防护喷剂放疗皮肤保护剂说明书注意事项不良反应
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	兴优:兴优 30ml:30ml 河南:开封
公司地址	尉氏县新尉工业园区优德大道1号
联系电话	18039570161 18039570161

产品详情

lin 床使用指南：

- 1.本品属外用喷剂，与肌内注射对比，SOD的免疫原性影响较小，不易产生过敏反应。
- 2.本品属溶液型喷剂，每喷喷量0.1mL，可定量给药，建议0.1mL/cm。根据需保护皮肤或粘膜面积可灵活掌握，做到SOD剂量适当。
- 3.预防：.放疗前一天开始使用，针对放射野内皮肤或粘膜（如口腔粘膜、鼻腔粘膜、肠管、阴道等与外界相通体腔的湿润衬里）喷涂，每日早、中、午、晚各一次。
- 4.治疗 放疗期间：使用面积超过照射野区域5厘米——常规3次，放疗前后10分钟内各用1次，减轻皮肤组织损伤程度，促进创面愈合。
- 5、结束阶段 放疗后（2周）：照射野及周围皮肤——每日4次，早、中、午、晚，修复受损皮肤组织，减轻皮肤组织纤维化、色素沉着。
- 6.建议A、B瓶配制后一个月内使用完毕。

【放射性皮炎】

男，30岁，基底细胞癌。经放射治疗后，皮肤形成红斑水肿后组织坏死，形成顽固性溃疡。溃疡底面有污秽的黄白色坏死组织块，剧痛且难以愈合，使用兴优医用射线防护喷剂喷涂每日3次，放疗前后10分钟

内各用1次，对创面进行涂擦一周后，溃疡得到有效控制。连续使用一个月后，皮肤基本恢复正常，使用至放疗结束后第3周。