

# 血透析轮椅秤，坐式体重秤 联网透析电子秤

产品名称	血透析轮椅秤，坐式体重秤 联网透析电子秤
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 型号:SCS-YCH 量程:300kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

## 产品详情

血透析轮椅秤，坐式体重秤 联网透析电子秤

标配RS232接口连接医院电脑对接大屏幕显示，直观读称重数据，每次称重前刷卡，后台方便管理。

可以提供给坐在轮椅上的人士称量使用，具备称重功能，电子秤电源交直流两用，

不锈钢材质制作，可提高医疗单位的档次，较主要的是给病人提供了方便。

高强度秤体结构（自重75kg）确保病人称重平稳安全及精准性。

人性化设计 可以直接用螺丝刀调秤水平高低，不用翻秤体，非常方便

秤体上配上蓝色的防滑垫更好的保护秤体的寿命。耐磨性好。美观且实用。容易清洁。

感量100g及50g转换设计。

可扣除轮椅车皮重量，以测得实际体重。

我们公司特制小量程高精度传感器就有效解决了轮椅电子秤误差大的问题

坐稳后，自动显示并锁住体重值，不需碰触任何键。

秤体下方有4个支撑脚，方便移动和调节水平高低

轮椅秤安装：

- 1、传感器信号输出线已提前为您接好，插入仪表即可使用。
- 2、用赠送的一字螺丝刀从秤体上部可轻松调节支脚高低，省去搬抬秤体调节高低的人力。
- 3、此处有一个非常重要的环节——调节整个秤体的水平！通过四个调节支脚卸下调节螺丝，把四个支脚都往逆时针方向拧到较底，让秤体下降到较低位置。再把四个支脚向顺时针方向拧3-4圈，让引坡高度控制在1公分左右。
- 4、此时将固定重量物体放在秤台中间及四个角落，验证读数是否一致。小小的两步动作，就可以让医用轮椅秤避免干扰影响称重的\*\*\*度啦。