

# 数字音乐胃肠治疗仪-胃肠治疗机-消化科

产品名称	数字音乐胃肠治疗仪-胃肠治疗机-消化科
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:治疗、改善类 功能:胃肠起搏点、中医贴敷 型号:CGP-III
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

数字音乐胃肠治疗仪

型号：CGP-II

数字音乐胃肠治疗仪是国内采用音乐电作为起搏信号的胃肠功能治疗仪，利用类正弦信号与音乐信号的优化叠加，模拟出接近于正常人体的胃电生理信号。用该复合信号进行胃肠起搏可快速建立“跟随—谐振”效应，使胃肠电节律得到改善。普通中低频信号由于频率单一穿透能力弱，很难影响到起搏点达到胃肠起搏的功效。

“胃肠起搏”类似心脏起搏是学术界公认的治疗胃肠功能性疾病的有效方法。该方法不同于“神经肌肉刺激”、“透药”、“红外热疗”、“磁疗”、“推拿按摩”等物理疗法。这些疗法可能会对某些症状有所改善但并不能从根本上改变胃肠电节律，达到彻底治疗的目的。

针对音乐电起搏信号的特点，研发并注册了胃肠起搏电极。该电极中导电粘胶的成分为高分子纳米材料与中低频治疗仪、透药治疗仪等所使用的电极片成分有本质区别。使用其他电极会对起搏信号产生衰减和干扰，可能会有不良反应。

数字音乐胃肠治疗仪如何进行治疗？

### 1.胃肠起搏（图中黄线表示）

将起搏电极贴于胃起搏点在体表的投影位置（正极至于剑突与肚脐连线中点，向右旁开2-4cm处；负极至于中点向左旁开3-5cm再往上1cm处）。

### 2.穴位刺激（图中绿线表示）

将穴位刺激电极贴与双脚足三里穴位处（该穴位为胃肠功能的主控穴位），也可贴于合谷穴。

### 3.音乐疗法（图中黑线表示）

治疗过程中头戴耳机聆听音乐。刺激的强弱随着音乐的高低起伏同步变化，犹如音乐喷泉。

4.每次治疗20-40分钟，一天两次，7天为一个疗程。

操作简单，无需护士陪同！

功能及特点：

主机配有10英寸高分辨率触摸液晶，一体式设计移动方便。

彩色界面触摸操控,可显示治疗参数(如:时间、模式、频率、强度等)。

默认参数设置,操作简单可快速上手。

三通道输出,可同时进行胃肠起搏、穴位刺激与音乐疗法。

内置TF卡与USB接口,用户可自行更换TF卡上面的曲目。

治疗过程中可通过耳机聆听音乐，感受刺激与音乐的同步变化。

专用体表胃肠起搏电极,药监局备案耗材安全有效性高。

易损件双倍配置,用户更省心。

数字音乐胃肠治疗仪产品适用范围：

收费标准

随着人们生活习惯的改变和工作压力的不断加大，胃、肠疾病呈现多发、频发态势，人群发病率20%-40%，目前胃肠紊乱性疾病的治疗主要依赖促胃肠动力药物，但部分患者疗效不佳，病情反复发作，给患者日常生活带来诸多不便。“数字化音乐电胃肠功能治疗仪”，针对病因，源头辅助治疗胃肠疾病，疗效显著。

功能性胃肠病是以功能紊乱所致的消化系统综合征或疾病,是器质、心理及社会因素复杂相互作用的一种病理状态。数字化音乐电胃肠功能治疗仪是基于胃肠起搏点的电节律活动可被外加的不同频率电流所“驱动”，利用先进的电子技术模拟正常的胃肠电信号，选择适宜的起搏参数，通过体表贴敷电极，作用于胃肠起搏点，并使它产生“跟随谐振”效应，从而纠正异常的胃肠电节律或抑制异位起搏点的电活动，促进胃肠产生足够有效的节律性收缩及推进运动，缓解或消除胃肠功能紊乱的症状，获得胃肠起搏、音乐治疗、穴位刺激、神经调节、免疫调节等多重效果，从而达到治疗的目的。

胃肠动力障碍性疾病和功能性胃肠疾病的症状通常表现为:上腹部及胸骨后疼痛、上腹饱胀或胀气、食欲不振、早饱、烧心、呃逆、嗝气、厌食、恶心、呕吐、反酸或食物反流、难以描述的上腹不适、腹泻、便秘及排便困难。

