

东博骨康（陶瓷人工骨）

产品名称	东博骨康（陶瓷人工骨）
公司名称	湖南安信纳米生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长沙高新技术产业开发区隆平高科技园办公楼2楼
联系电话	0731-82416666-8288 15074863288

产品详情

产品名称：东博骨康（陶瓷人工骨）

招商区域：全国 产品类别：请选择分类 批准文号：国食药监械（准）字2010第3460573号

产品功效 诱导性本产品植入人体内具有亲骨性，因表面亲水性质，可将人体各种蛋白吸附于表面，同时骨基质中的形态蛋白（bmp）等诱导亦吸附到人工骨表面，与受体细胞直接接触，诱导成骨细胞活化增殖，从而促进新骨形成。传导性经临床验证，本产品植入股骨处，在孔隙内，有成骨细胞分化间质母细胞分化组织胶原形成，为新骨生长构造微环境基础。四周内，人工骨表面和孔隙内出现大量新生骨组织，并有结缔组织形成。降解性本产品植入人体后，经体液溶解；经破骨细胞吞噬、巨核细胞吞噬降解，产生的磷和钙直接参与骨的重建，或进入体内排泄。东博骨康生物陶瓷人工骨最大的优点在于：产品吸收、降解速度与新骨生长速度相匹配。降解性本产品植入人体后，经体液溶解；经破骨细胞吞噬、巨核细胞吞噬降解，产生的磷和钙直接参与骨的重建，或进入体内排泄。东博骨康生物陶瓷人工骨最大的优点在于：产品吸收、降解速度与新骨生长速度相匹配。

产品说明 各种创伤或手术造成的骨缺损各种良性骨肿瘤刮除术所致骨缺损骨结核病灶刮除后所致骨缺损骨延迟愈合及骨不连骨节置换术的骨缺损等

剂型：颗粒剂

规格：1克×3颗/盒 1克×3颗/盒 2克×3颗/盒 1.5克×2颗/盒

成份：羟基磷灰石—磷酸钙 hatcp

用法用量：1.手术方法和常规植骨手术方法相同

- 2.内包封口处以酒精或络合碘消毒，无菌剪开包装，取出本品
- 3.根据手术情况用骨刀切成任意大小和形状
- 4.直接植入骨缺损处，尽可能与正常骨接触，用骨膜或骨片覆盖
- 5.手术中用于填充骨缺损处或骨断端，可加入适量抗菌素
- 6.一次使用量在100克以上时，建议加入部分自体骨混合使用

对代理商要求 · 有长期合作的决心； · 具有较强的责任心和信心； · 完善的销售网络；
· 具有一定的经济实力和良好的商业信誉； · 具有丰富的市场操作经验，较强的市场开发能力；

备注说明

可提供支持 · 及时提供货源，确保全国范围内2~10天内到货；
· 实行区域独家代理，确保运作者权益； · 提供合理的运作空间，确保投入与收益成正比；
· 企业会持续稳定给予代理商做全面服务工作； · 完成任务年终返点； · 提供合法的经营手续；