

壁挂式动物抓咬伤伤口处置设备-犬伤清创机

产品名称	壁挂式动物抓咬伤伤口处置设备-犬伤清创机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

狂犬病暴露后处置两个目标

一预防狂犬病的发生;

二预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

· 犬伤清创机（医用创口冲洗机）适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外创新鲜创面，犬咬伤清创机是一款伤口清洗设备。针对不同伤口，可选用不同流动液体清洗液（肥皂水、生理盐水等），彻底清洗伤口杂物，污血，有效减少伤口细菌、病毒数量。

伤口处理

伤口处理包括对伤口内部进行彻底的冲洗、消毒以及后续的外创处置，这对于预防狂犬病发生，避免继发细菌感染具有重要意义。

伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。然后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残

消毒处理:彻底冲洗后用稀碘伏(0.025 %-0.05 %)、苯扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或其他病毒灭活效力的皮肤粘膜消毒水消毒涂擦或者消毒伤口内

----以上资料出自狂犬病预防控制技术指南(2016版)

1、符合卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求

2、一键自动冲洗、清单自动打印，记录自动保存、统计，枪柄无线控制压力，解放门诊人力物力

3、带快捷接口的冲洗消毒液+消毒喷剂，免去配皂液、涂碘伏等繁琐的流程，安全又高效！

4、壁挂式设计，不占空间，方便小巧。

对于有活动性出血的伤口应给予直接压迫止血，并应在伤口远端区域进行神经血管评估。深至重要结构的伤口应作为严重穿透伤处理。

伤口的处理不仅有利于重要解剖结构及功能恢复，同时是预防伤口感染，预防破伤风、狂犬病的重要措施，临床必须给与伤口处置足够的重视，避免不必要的并发症的出现。

伤口冲洗和清洗

用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗所有咬伤处约 15 分钟，然后用无菌纱布或脱脂棉将伤口处残留液吸尽，若清洗时疼痛剧烈，可给予局部麻醉，如条件允许，可以清洗设备对伤口内部进行冲洗，以确保达到有效冲洗，后用生理盐水冲洗伤口，避免在伤口处残留肥皂水或其他清洗剂。

有证据表明，即使在没有使用狂犬病被动免疫制剂的情况下，通过有效的伤口清洗加立即接种狂犬病疫苗并完成暴露后预防程序，99%以上的患者可以存活。

消毒处理

彻底冲洗后用稀碘伏或其他具有灭活病毒能力的医用制剂涂擦或清洗伤口内部，可以灭活伤口局部残存的狂犬病病毒。

清创及扩创

犬咬伤伤口尤其撕裂伤清创去除坏死组织，必要时行扩创术，穿刺伤伤口可以进行必要扩创确保清创效果。伤口闭合的方法因咬伤类型不同而在一定程度上有差异，划伤及简单穿刺伤不需要 I 期闭合。单纯撕裂伤伤口，临床医生可采取 I 期伤口闭合。如果美观需要时，如面部撕裂伤，临床医生也可以对这类伤口选择 I 期修复。