

# 光纤负压减肥仪/塑形光纤减肥仪/厂家大量批发减肥仪器

产品名称	光纤负压减肥仪/塑形光纤减肥仪/厂家大量批发减肥仪器
公司名称	广州美莱雅美容美体仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	广州白云大朗中路自编18号
联系电话	13189048177

## 产品详情

纤负压纤体仪

### 说明书

#### 一、仪器原理

利用真空负压灭脂、激活细胞畅通淋巴结,将身体多余水分、油脂及废物及时排除体外的同时,可直接作用于脂肪囤积部位,达到快速软化溶解脂肪、收紧肌肉快速瘦身的功效,它所做到的不仅仅是健康减掉多余脂肪,还给整个肌体带来了健康。

负压吸力原理,将肌肉朝相反的方向提升,开成反地心吸务的效果,按摩不同的结缔组织,优化皮下组织微循环,有效促进血液回流。令肌肤的胶原蛋白及弹性纤维细胞高出平常的1.3倍,充分作用于人体皮下脂肪层进行揉捏、挤压、按摩,达到疏通经络、促进血液循环、强化脂肪分解,祛水肿,促进机体代谢,深层微细按摩,活化脂肪细胞加速肌肤新陈代谢,使皮层内脂肪、体内沉积物经淋巴引流顺利排出。并有效的改善囤积脂肪,完美水晶肌肤。

#### 功能

吸附原理:通过负气压的原理,利用光、电、热补充胸部细胞能量渗透至皮下8cm,重新排列肌纤维组织结构,加速血液循环,疏通乳腺组织,加速淋巴循环排出毒素和废物。达到预防治疗各种乳腺疾病的功效。同时通过远红外产生能量加大对第一性器官的刺激令胸部吸收充足营养,细胞分裂迅速加快,使结缔组织再生,令胸部自然丰满挺立。

功能范围:丰胸、矫正胸形、乳头内陷、排毒刮痧、打散蜂蜜组织、提臀修形的功效。

理疗原理：通过仿生物电流对乳腺导管进行刺激，疏通乳腺导管，再通过红外线的温热效应，加速血液循环，活化细胞，补充养分，加速新陈代谢功能。

功能范围：疏通乳腺导管，软化乳房内结节及硬块，卵巢保养、肾保养、缓解性冷淡。

## 二、面板示意图

## 三、显示屏介绍

### 四、操作说明：

- 1、打开电源开关，插上IC卡，选择所需操作的配件。液晶上显示所有功能
- 2、按启动/暂停键，仪器进入工作状态
- 3、液晶上显示BIO、S/P、R/C/B、Eime count
- 4、BIO：是光电丰胸杯和微电精油头的功能（E：01-16是调节微电的强度，M：A、B、C是微电的三种模式）
- 5、S/P：吸负功能，选择S是吸负功能，P是放气功能，（M为吸负选择，A：小负压操作头，B：大负压操作头，C：丰胸杯吸功能）
- 6、R/C/B是光子选择（选择E：是光子强度，M：是光子模式，A、B、C共三种模式）
- 7、Eime工作时间，count插卡

## 二、仪器功效

### (一) . 面部：

- 1、针对衰老皮肤：提升收紧、淡化皱纹、轮廓修饰、祛浮肿瘦面、收紧双下巴、祛除颈纹、改善眼袋、黑眼圈、淡化眼部皱纹、增强眼部循环代谢功能。
- 2、针对肤质改善：淋巴排毒、淋巴引流、去黄暗、美白淡斑、细腻红润肌肤、深层渗透营养、收细毛孔、改善粗糙老化肌肤；

### (二) . 身体：

- 1、针对肥胖人群：消除蜂窝组织炎、快速灭脂、收腰瘦身、手臂紧实、腿部紧实
- 2、针对保养人群：全身淋巴排毒、淋巴引流、丰胸美胸、提臀、雕塑体型、紧实肌肤、通经活络

## 三、真空气压作用与功效

一	针对表皮层	真空气压吸脂原理能够改善外细胞间隙的液体状况，增强液体的动性
二	针对血管层	真空气压治疗能够增进皮下微循环的排水系统，不只是毛细管的排水系统，同时改善深层血管及淋巴网络的流动功能
三	针对组织层	由真空气压产生的揉捏作用，增加皮肤及肌肉组织活动，从而帮助纤灭硬性蜂窝组织弹性，塑型及瘦身能够同时进行
四	针对神经系统层	真空气压移动能够刺激表面及深层的交感神经系统，同时亦能刺激皮肤感应接收器改善皮肤敏感度及各种反射过程

#### 四. 光纤负压纤体仪

光纤负压纤体仪拥有超强负压推脂和超微渗透波合璧，适合身体及面部多个部位，它能同时输出负压活化细胞及分解脂肪同时进行，脂肪细胞被负气压吸啗实时打散，瘦身效果立即见到！无论多厚的脂肪都能彻底消灭，而且减去的磅数及时数更能长久保持不会「反弹」。

- 1、刺激血液和淋巴循环，提高肌肤的新陈代谢功能；
- 2、畅通阻塞的淋巴结，以便在进行脂肪分解和淋巴引流时，毒素得以正常排出体外；
- 3、深入皮下组织燃烧脂肪；
- 4、收紧皮肤如肚皮纹、妊娠纹、鱼尾纹等；

## 五、针对位置：身体部分

- 1、由大腿内侧 大腿前 大腿外侧顺序向上拉至腹股沟方向
- 2、大腿内侧和外侧可用Z或用大8字手法来回向上推动
- 3、后大腿全向上拉至臀部位置
- 4、小腿可用向上拉或用Z手法来回向上推动

### 针对位置：背部及手臂

- 1、背部上脊椎中心点推向腋下淋巴结位置
- 2、后手臂全向上拉至腋下淋巴结位置
- 3、前手臂由下向上拉至腋下淋巴结位置

### 针对位置：腹部

- 1、由背部下脊椎中心点开始拉向前腰直达腹股沟方向
  - 2、以顺时针方向由上结肠 横结肠 降结肠顺序行至腹股沟位置停
  - 3、胃膈以A字手法向下拉至腹股沟方向
- 1.上腹：将液体引流到腋下淋巴结
  - 2.下腹：将液体引流到腹股沟淋巴结
  - 3.腰部：将液体引流到腹股沟淋

### 针对位置：臀部及腿部

- 1.后腿：将液体引流到腹股沟淋巴结
- 2.小腿：将液体引流到月国位淋巴结
- 3.关节位：关节位液体引流到淋巴

针对位置：背部

- 1.肩部：将液体引流到锁骨窝位淋巴结
- 2.臀部：将液体引流到腹股沟淋巴结
- 3.背部：将液体引流到腋下淋巴结

光纤负压纤体仪

1、经常做光纤负压纤体的主要功能有哪些？

答：美容作用：收紧、提升、瘦脸、抗衰老、均匀肤色、平伏敏感、消炎镇定，改善眼部问题

美体作用：分解脂肪、塑形收紧。淋巴排毒等。

2. 会不会有依赖性，越好的效果，依赖性越重？

答：光纤负压纤体效果好而快，是因为光的速度及对皮肤细胞针对性治疗，从根本上解决了您的问题，效果肯定好。女性的皮肤随着年龄的增长及环境因素的影响会变得越来越脆弱，这需要您长期的养护才能维持，这并不代表依赖。

3、顾客做完一个疗程会达到什么效果？能维持多久？

答：做完这个疗程您的皮肤问题从根本上改善过来了，相应的，皮肤有了足够的营养、水分及能量补充之后，呈现的皮肤光泽度、紧实度，都会比您现在状况要好上十倍以上的，维持多久在于您的细心呵护，家居的精心养护及美容护理正常进行，您不能说做完这个疗程之后，从此不涉足美容院了。这样，年龄增长、地心引力影响，您的皮肤同样会受影响的，正如花草植物，刚开始细心浇水、施肥，等它长得非常旺盛之后，突然停止供应水分和施肥，它又会开始逐渐衰退甚至死亡，故您得悉心保养您的肌肤。

4、光纤负压纤体仪的原理？（负气压）的作用是什么？

答：激活细胞，做生化刺激，使脂肪细胞产生运动加速脂肪燃烧速度，再配合负气压将皮肤吸起，增加脂肪细胞与组织间的液体流动，畅通阻塞的淋巴结使毒素得以正常排出体外，收紧皮肤，减少蜂窝组织形成。作用于身体和面部达到溶脂、排毒、收紧、提升、纤面、减肥的功效。

5、光纤负压纤体仪主要适合什么样的人群？

答：除肿瘤、癌症病人、怀孕妇女不可使用以外，任何有美容、减肥需要的人士都适合使用。

八、使用须知及注意事项

- 1、美容师请仔细阅读使用说明书后,方可操作。
- 2、每一疗程之操作时间建议在30-40分钟左右.
- 3、使用时一定要按正确的使用方法和步骤操作,以免发生故障。
- 4、使用过程中,信号强度需根据个人的感受进行调节,并保持在顾客能够承受的范围之内。

- 5、疗程过后建议顾客饮用300~500C.C的白开水,促进体内新陈代谢,以利将分解的废毒素排除体外。
- 6、进行美体疗程,需于饭后1小时后再进行,以免引起顾客不适感受。
- 7、仪器使用过后应彻底清洁,使仪器永保如新,增长仪器的寿命。
- 8、妊娠期间或产后3个月内,不建议进行此仪器疗程。
- 9、重大疾病之病患不建议使用此仪器疗程。
- 10、请勿擅自拆卸,修理,改造仪器(会形成故障或引发事故)。
- 11、仪器使用结束后,请务必关闭电源开关及拔下电源插头。
- 12、本产品应注意防火,防晒,防潮,防撞击,配件工具需妥善放置。
- 13、若因机器故障采取处理措施前,请先暂停所有疗程动作,并且将输