

透析联网的体重秤 坐式轮椅秤 座椅电子秤厂家

产品名称	透析联网的体重秤 坐式轮椅秤 座椅电子秤厂家
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 型号:SCS-YCH 量程:300kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

产品详情

透析联网的体重秤 坐式轮椅秤 座椅电子秤厂家

透析患者称重，方便推轮椅称重，扣除皮重，使用简单方便，高精度联网轮椅秤，配置刷卡、连接大屏显示称重数据。

血液透析的目的之一是清除患者体内多余的水分，那么如何知道血液透析过程中该脱多少水呢？答案是——靠体重来计算，脱水量=血液透析前体重 - 干体重。除此之外，称体重还可用于监测血液透析治疗患者体内异常的体液积聚。所以透析称体重是每个患者都有必要做的一件事。

技术参数：

较大称量: 300 kg

重量分度: 100 g

秤体重量:75 kg

电源: 交直流两用供电

尺寸: 800*820 mm

准确度等级：III级

外形尺寸：1.0*1.2M

材 质：碳钢和不锈钢可选

>使用温度: 0 ~40

>储运温度: -25 ~55

透析轮椅秤精度高，稳定可靠，在原有秤体上经过改良设计加长引坡，

护士可以非常轻松的推着患者轮椅上秤称量体重，

高强度加固秤体（自重80kg,比市面普通秤重一倍）结构配上4支精度传感器 大程度解决误差问题。

不用翻秤体可调节水平高低不平，在秤体上配了PVC防护垫更好的保护秤体，

更人性化的采用了与医院贴合的白蓝色调,延长体重秤使用寿命。

标配的232接口通讯和医院系统对接，可随时掌控患者的体重，方便称重数据管理。

维护保养：

（1）该产品不能超载，应专秤专用，由专人进行维护，注意操作环境中的湿度和粉尘

（2）称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性, 杜绝暴露在露天环境雨林使用