

# 早早孕检测笔

产品名称	早早孕检测笔
公司名称	夏日冰花健康的驿站
价格	5.00/支
规格参数	
公司地址	江苏常州芦墅路8号楼
联系电话	0519-83352216 15995011597

## 产品详情

### 【使用方法】

- 1、除去试剂盒外包装，取出早孕测试板；
- 2、使用配套专用一次性尿杯收集尿液，用吸管将 2 - 3 滴尿液滴入早孕检测板的圆孔中；
- 3、3 - 5分钟内观察结果。

### 【结果判定】

- 1.阳性：在检测T区(检测线)和对照线C区(对照线)各出现一条色带，表示已怀孕；
- 2.阴性：仅在对照C区出现一条色带，表示没有怀孕；
- 3.无效：在检测T区和对照C区均不出现色带，表示检测无效。

### 【产品规格】1人份/盒

### 【注意事项】

- 1、检测时检测笔随测随取，撕开封口后不可保存。

2、5分钟后观测结果无效。

3、在怀疑受孕的当天即可测试。

4、尿液测试阴性，而被测试者仍怀疑有受孕可能，可在48-72小时后重新收集尿液再检测；

5、子宫肌瘤、葡萄胎或更年期病人，因尿液中HCG含量较高，可能会出现阳性结果；当HCG的浓度过高时（超过50000mIU/ml），可能发生钩状效应，检测结果可能会显示阴性，应当稀释后再测；

6、仅供体外诊断一次性使用。铝箔袋内有干燥剂，不得内服。