

# 自动身高体重测量仪乐佳体检秤HW-600B医用人称

产品名称	自动身高体重测量仪乐佳体检秤HW-600B医用人称
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	16900.00/台
规格参数	身高测量:60-200cm 体重测量:8-200kg 血压测量:0-299mmHg
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

体检中心电子秤，自动身高体重测量仪乐佳体检秤HW-600B医用人称，乐佳身高体重血压测量仪。

### HW-600B身高体重血压一体机 基本介绍

乐佳电子超声波身高体重体检机，全自动自助测量更加人性化，方便化，不需要任何外物辅助，测试者只要站在机器底盘中间就可以测量出身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏

胖、肥胖）、血压（高压、低压）、心率，同时语音播报，数码显示，打印小票，型号功能多种可进行定制。

### 身高体重血压秤HW-600B身高体重血压一体机 性能特点

美国进口超声波探头测量身高，不受外界环境影响，测量快速准；

中航高精密度压力传感器测量体重，灵敏度高，测量准快速；

日本欧\*\*龙臂式血压测量仪测量高压低压脉搏

日本精工热敏打印机，打印测量报告；

机身金属制作，表面静电喷塑，抗氧化；

底盘冷板冲压成型，非铸铁，结实耐用；

LED高亮数码显示，同步语音指导提示测量；

身高体重血压秤HW-600B身高体重血压一体机 技术参数

身高测量范围：60-200cm分度值0.5cm

体重测量范围：8-200kg分度值0.1kg

血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏测量范围：40-180次/min

体型指数：BMI体型指数自动计算，指示体型偏瘦、正常、偏胖、肥胖

身高体重血压秤HW-600B身高体重血压一体机 使用注意事项

- 1、为保证测试精度，本仪器须安放于水平硬质地面上，调平底盘四角。
- 2、开机时测试底盘上不得站人或摆放重物。
- 3、进入测量过程中，受试者身体不得摆动。
- 4、仪器应注意防水防潮防暴晒，不得用有机溶剂进行清洁
- 5、受试者着轻装，赤足，背向立柱立正姿势站在电子秤的底板上，要求头部正直，躯干自然挺直，上肢自然下垂，足跟并拢，足尖分开60度。
- 6、2~3秒钟后。测量结果液晶显示，同步语音提示，测试完毕。