

# 便携式健康体检一体机HW-900A可折叠体检机

产品名称	便携式健康体检一体机HW-900A可折叠体检机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-900A 适用范围:体检中心卫生院社区等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

卫生院下乡体检适用型，便携式健康体检一体机HW-900A可折叠体检机，健康自助体检机。

便携式自助检测一体机,乐佳900A型智能健康一体机

操作指南：

### 1、身高体重：

点击主界面“身高体重”图标可进入身高体重测量界面，测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量

注意：进入测量状态后，为了更准确、快速的完成身高和体重的测量，应该站直、站稳、目光平视、挺直身体，不要晃动。

### 2、人体成分分析

点击主界面“人体成分”图标可进入人体成分测量界面，测量人体成分必须先进行登录并测量身高体重；测量超时后会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量

注意：测量过程中请双手握紧脂肪把手

### 3、血压监测

点击主界面“血压”图标可进入血压测量界面，点击“开始测量”图标开始测量血压，测量超时会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量

注意：测量时请放松，不要动也不要说话

### 4、血氧测量

点击主界面“血氧”图标可进入血氧测量界面，测量超时会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量。

注意：测量过程中请将手指插入血氧仪，保持放松

### 5、体温测量

点击主界面“体温”图标可进入体温测量界面，测量超时会自动退出到主界面，如有测量错误可重新测量。

注意：请将体温仪对准额头二到三厘米处，扣动体温仪开关测量体温