

高级全身心肺复苏训练模拟人

产品名称	高级全身心肺复苏训练模拟人
公司名称	上海益联科教设备有限公司（销售部）
价格	5300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路201弄3号1501室
联系电话	86-02164188033 13761910633

产品详情

标准套配置：高级复苏全身人体模型一具；高级显示器一台；
豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；
可换肺囊装置二套；可换面皮一只；保修卡、合格证；使用手册一本；
2010国际最新操作指南光盘1盘；

该产品采用美国心脏学会（AHA）2005国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，并在第二代的基礎上进行升级，开发出专问件P32社会心肺复苏普及与医学院校21医师8033系统培
我们可以提供经济实惠第要求新高级全身心肺复苏训练模型需要选择相关产品！

执行标准1：2010年国际心肺复苏(CPR)指南的最新标准

执行标准2：美国心脏学会(AHA)2005国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准

主要功能：模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压显示报警：

1. 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。2. 按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4~5<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。人工口对口呼吸（吹气）显示报警：1. 吹入的潮气量500ml~600ml 的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30:2个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分；操作方式：训练操作。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压舒服电源6V。材料特点：面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。