

# 循环式空气压力波治疗仪-预防静脉血栓

产品名称	循环式空气压力波治疗仪-预防静脉血栓
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 规格:YLB-1 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

空气波压力循环治疗仪是采用具备梯度压力、实时压力监测等多种功能的空气波，能达到促进静脉回流和动脉灌注以及锻炼骨骼肌防止肌肉萎缩的目的。

空气波压力循环治疗仪可以有效的

预防下肢深静脉血栓

改善下肢静脉曲张

消除肢体水肿

增强动脉灌注

### 一、治疗原理

空气波压力循环治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，加压时，经组织间压力传导，组织液静水压显著升高，从而产生克服毛细血管内压及组织间胶体渗透压的作用，促进组织液静脉及淋巴管内回流。

由肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿。

由肢体的近端端到肢体的远端进行均匀有序的挤压，促进动脉血流动到肢端，帮助动脉缺血减轻，有利于增强动脉灌注，改善间歇性跛行。

通过均匀的压力按摩，且达到了所需压力值，可以加速血液中代谢产品的排除。可以防止肌肉萎缩，防

止肌肉纤维化，加强肢体含氧量，有助于解决因血液循环障碍引起的疾病。

#空气波治疗仪能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。

空气波压力治疗仪运用环状间歇压力，通过空气波套筒气囊的反复膨胀和收缩作用，对肢体的远端脚部到肢体的近端大腿根部进行均匀有次的挤压，可以达到促进肢体血液循环，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿。

空气波压力治疗仪适应症：

预防深静脉血栓（DVT）、静脉功能不全；淋巴水肿、产后水肿等各种原发、继发、混合型水肿；骨折、股骨头坏死、软组织损伤等骨伤；糖尿病引起的末梢神经炎、糖尿病足；术后的康复患者；肢体瘫痪者；静脉曲张患者；久站、久坐的或者长期卧床的病人。

患者使用后可以达到以下效果：

- 1、可改善心脑血管功能供血,预防心脑血管病的发生。缓解脑部供血不足引起的头痛、头晕、失眠等。
- 2、用于肢体按摩，肢体放松，促进肢体静脉回流，促进运动性乳酸的吸收，缓解运动性疲劳。
- 3、促进下肢血液循环、解除肌肉疲劳、缓解疼痛、使麻痹不适肢体的康复，还可缓解四肢麻木，手脚冰凉等供血不足的症状。