

空气波压力治疗仪-科学预防深静脉血栓

产品名称	空气波压力治疗仪-科学预防深静脉血栓
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 规格:YLB-1 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

空气波压力治疗仪运用环状间歇压力，通过空气波套筒气囊的反复膨胀和收缩作用，对肢体的远端脚部到肢体的近端大腿根部进行均匀有次的挤压，可以达到促进肢体血液循环，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿。

空气波压力治疗仪适应症：

预防深静脉血栓（DVT）、静脉功能不全；淋巴水肿、产后水肿等各种原发、继发、混合型水肿；骨折、股骨头坏死、软组织损伤等骨伤；糖尿病引起的末梢神经炎、糖尿病足；术后的康复患者；肢体瘫痪者；静脉曲张患者；久站、久坐的或者长期卧床的病人。

患者使用后可以达到以下效果：

- 1、可改善心脑血管供血,预防心脑血管病的发生。缓解脑部供血不足引起的头痛、头晕、失眠等。
- 2、用于肢体按摩，肢体放松，促进肢体静脉回流，促进运动性乳酸的吸收，缓解运动性疲劳。
- 3、促进下肢血液循环、解除肌肉疲劳、缓解疼痛、使麻痹不适肢体的康复，还可缓解四肢麻木，手脚冰凉等供血不足的症状。

注意事项：

- 1、治疗前检查设备是否完好，患者有无出血。
- 2、每次治疗前检查患肢，若有尚未结痂的溃疡或压疮，如有应加以隔离保护后再进行治疗，若有出血伤

口则应暂缓治疗。

- 3、治疗应在患者清醒下治疗，患者应无[感觉障碍](#)。
- 4、治疗过程中应注意观察患肢的肤色变化情况，并询问患者的感觉，根据情况及时调整治疗剂量。
- 5、向患者说明治疗作用，解除其顾虑，鼓励患者积极参与配合治疗。
- 6、对老年，血管弹性差的患者，压力值从小开始，逐步增加、到耐受为止。
- 7、病人如果暴露肢体/部位，请注意穿一次性棉质隔离衣或手套，防止交叉感染。
- 8、提倡初次使用正压顺序疗法的治疗人员先亲身试用一下仪器，以便为感觉障碍的病人治疗时有常规剂量可依。
- 9、治疗过程中多巡视病人，及时处理异常。